



カーボン・ケイン

品番	MRZ-17008
全長	710～935mm (25mmピッチ) (10段階調節)
重さ	200g
材質	グリップ 天然木
	支柱 カーボン
	つえ先ゴム 合成ゴム
	ストラップ(紐部分) ナイロン



⚠ ご使用前の注意

棒状つえは、つえ無しで自立歩行できる人がより安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。次のような場合の使用には適しません。
(体重をかけ過ぎたりするとかえって肩や手を痛めることがあるからです。) また、購入時はそうでなくても、次のような状態になった場合は使用を停止してください。

1. つえ無しで歩行できない方の使用。(手すりにつかまらなければ歩行できない方や、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない方の使用を含みます。)
2. リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない方の使用。ただし、医師などの指導のもとでの使用は含みません。

諸 元



SGマークが表示されたつえは安心してお使いいただけます。

SG マーク制度は、SG マーク付製品の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。
利用者の方が正常に使用していた時に、製品の欠陥により万が一事故が発生し、人身の損害を被った場合には、事故原因や被害の程度などに応じて、製品安全協会が賠償措置を実施します。

お申し出いただいた内容や必要に応じて製品安全協会が調査や検討を行い、製品の欠陥の有無などを判断します。


※保証期間はご購入後3年間です。

※つえそのものが故障した場合の品質保証ではございません。身体的な損害についての賠償制度になります。

製品の欠陥によって事故が起きた場合の連絡先

財団法人 製品安全協会
TEL 03-5808-3300(代表)

各部の名称

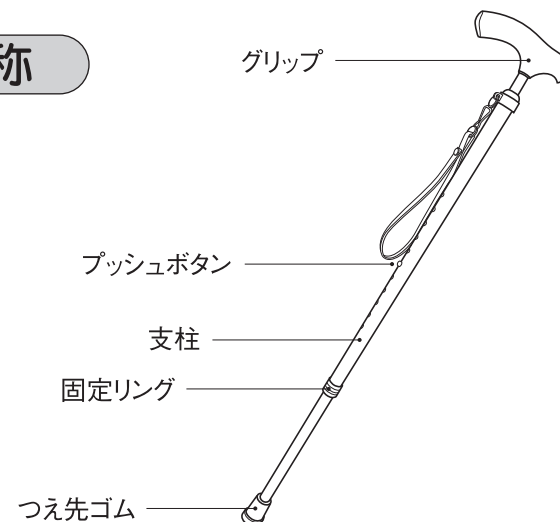

⚠ 危 険

【死亡または重傷を招くもの】

- つえ無しでの自立歩行ができない方、リハビリ中など体重の一部を支えないと歩行できない方（医師などの指導のもとでの使用を除く）は使用しないで下さい。転倒など事故やけがにつながる恐れがあります。
- グリップの端部に過大な力をかけないで下さい。
- つえを振り回したり投げたりしないで下さい。

⚠ 警 告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 本製品は必ず、医師や理学療法士または販売店の指導に基づいてご使用下さい。
- 身体に合った適切な長さのつえをご使用下さい。(つえの長さ参照)
- ご使用前には各部の点検をして下さい。(保守・点検参照)
- 濡れた床等、路面が滑りやすくなっている場所での使用は避けて下さい。
- つえ先ゴムが摩耗したり、劣化し外れやすくなった場合は、早めに交換してください。
- 使用中も含め、固定リングやプッシュボタンなど長さ調節部が確実に固定されたことを確認してご使用ください。
- 道路の側溝の溝や凹みがある箇所ではつえ先がはまり込む場合があるため、十分ご注意ください。

⚠ 注 意

【軽傷または物的損害を招くもの】

- 本製品は歩行補助用または歩行訓練用としてご使用下さい。
- 用途以外の登山用や護身用等には使用しないで下さい。
- 不用意につえを倒さないで下さい。破損の原因になります。
- つえを改造しての使用はしないで下さい。

保 証 書

1. 保証期間はご購入後1ケ年です。
2. 取扱説明書に基いた正常な使用状態で異常や故障が発生した場合、保証期間内に限り無償修理をいたします。
3. 次の場合は保証期間中でも有償修理といたします。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理改造による故障
(ロ) 天災地変などによる故障
(ハ) 保証書に販売店の押印のない場合
4. 故障の場合は販売店へご連絡ください。
5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This guarantee is valid only within Japan.
6. この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。



株式会社 ミ キ

〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号
TEL 0570-00-3993 ※愛知県への通話料が発生します

ご住所 〒	TEL	販売店
お名前	様	住 所
お買上げ日	年 月 日	店 名
		T E L




つえの長さ

- 通常使用する履き物を履き、力を抜いて自然に立ち（腰の曲がった方は曲がった状態で）、次のように正しくつえの長さを合わせて下さい。


合わせ方 ①

つえ先を足先の
前外方20cmの
位置についた時、
肘の角度が30°～
40°になる長さ

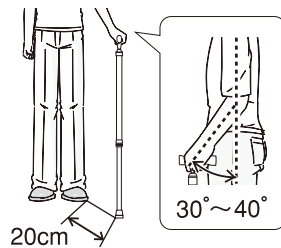


合わせ方 ③

腕を真下にのばした時の
床から手首までの長さ

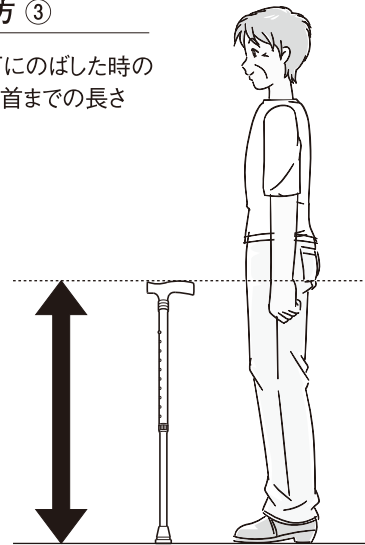


合わせ方 ②


床から大腿骨の
大転子までの長さ

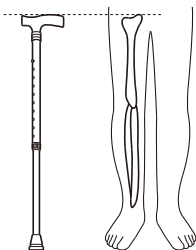


長さの調節

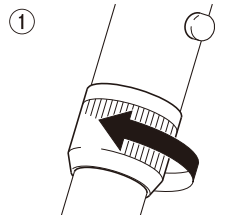


固定リングを緩めます

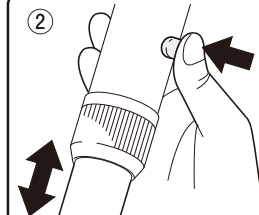

プッシュボタンを押し
長さを調節します

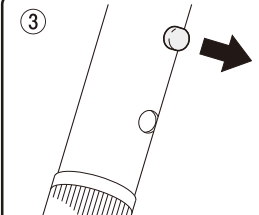

プッシュボタンが完全に
穴から出ていることを確認

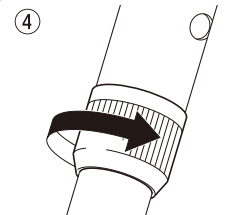


固定リングを締めます


※1 つえ先ゴムを外す時はグリップをねじって外さないで下さい。グリップが取れることがあります。

使用について


▲ 警告 本製品は必ず、医師や理学療法士または販売店の指導に基づいてご使用下さい。

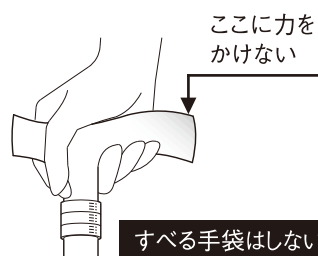

⚠ 溝等にはまらないように注意

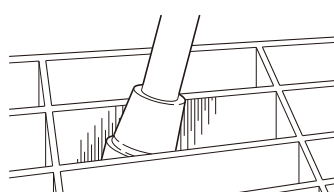

【つえひも】

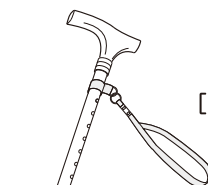

手首につえをぶら下げることが
でき、手すりにつかまる時等に
役立ちます。


保管

- ご使用後は、つえ先ゴムの底についた砂などを取り除いてください。
□ お子さまの手の届かないところに保管してください。
□ 直射日光を避け、風通しが良く、湿気のない屋内で保管して下さい。
□ つえの上に物を乗せたり、物を引っ掛けたまま保管しないで下さい。
□ つえは立てた状態で保管して下さい。
□ このつえを第三者に貸与したり譲渡したりする場合は、この取扱説明書を必ず添付し、取扱方法を十分に説明してください。

保守・点検


- 使用前、使用後は下記の項目を点検し保守を行って下さい。

①

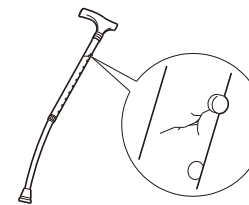


傷や亀裂が入っている
支柱が反っている
▶使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。

②

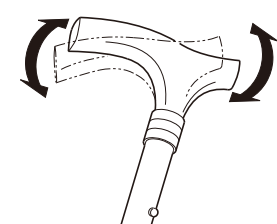


グリップがぐらつく
▶使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。

③

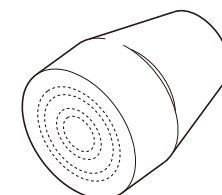


つえ先ゴムの溝が少なくなっている
▶つえ先ゴムを交換して下さい。

④

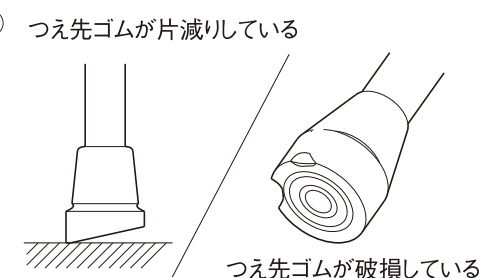


▶つえ先ゴムを交換して下さい。

⑤

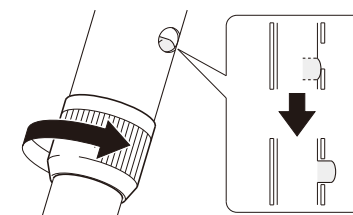

プッシュボタンが完全に穴から出ていない
固定リングが緩んでいる
▶プッシュボタンが完全に穴から出る位置に長さを調整し、固定リングをしっかり締めして下さい。長さ調整や固定リングの締め付けに不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。

⑥

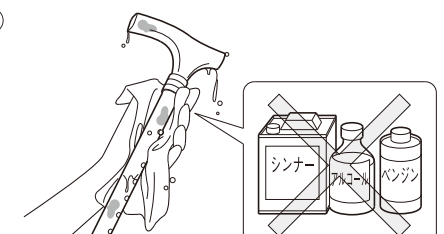

つえに水分がついていたり、泥等で汚れている
▶タオルかスポンジに中性洗剤を含ませて汚れを拭き取って下さい。拭き取った後は、乾いた布で水分を拭き取りよく乾かして下さい。

▲ 警告 ①～④の修理および部品の交換については販売店へ依頼してください。