

# ボンベ架 取扱説明書

この度は、ボンベ架をお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用の前に本書を必ずお読みいただき、理解し適切に取扱いしてください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。

## 注意・警告

- ・ボンベ以外での使用はしないでください。
- ・ボンベを載せる際はボンベ架がしっかり固定されていることを確認してから載せてください。
- ・ボンベ架とその他のオプションを併用取付けされる場合は、可能であればボンベ架以外のオプションは前方対角線にお取付ください。後方に並べて取付けた場合はボンベを設置した際に後方に転倒する危険性がありますのでご注意ください。また、移乗の際は、注意しご利用ください。
- ・ボンベを載せる場合は、押し手や背シートポケット等後方に荷重が掛からないようご利用してください。
- ・弊社車いすに他社製のオプションは対応しておりません。使用しないでください。

## 作業手順

～作業に使用するもの～

- ① 本体
- ② 固定用ステー
- ③ ノブ


- ・ プラスドライバー
- ・ 10mm用スパナ



ボンベ架




固定用ステー

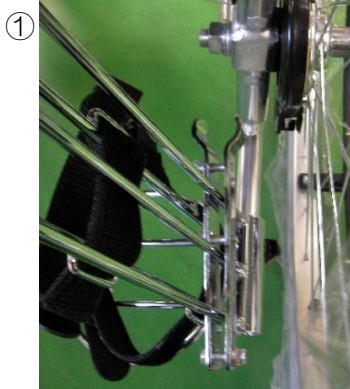

① ボンベ架をティッピングレバーに差し込みます。



② ステーのR部分をハブの上、可能な限り上部でパイプにはめ込みます。

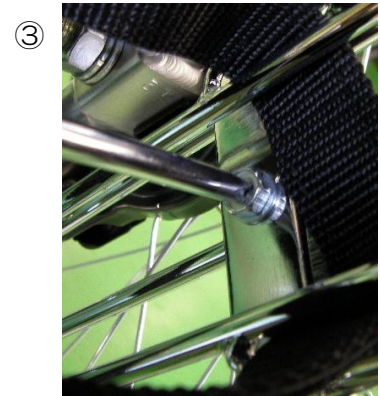

③ ガタつきがないようプラスドライバーと10mmスパナで3箇所のボルトを締めます。



④ ノブボルトを締めます。



⑤ 完成。

※サンプル車いすには、MPN43JDを使用。

## 条件

- ・ ティッピングレバー径がφ17.5であること。
- ・ MS-138延長ティッピングレバー（別売り）が必要になります。
- ・ ボンベ架を取り付けた側のウイング機能は使用不可となります。
- ・ 足踏み連動式ブレーキ装備の車いすには取付不可になります。


## 作業手順

～名称～

- ① 本体
- ② 固定用ステー
- ③ ノブ
- ④ インナーパイプ（使用しません）
- ⑤ MS-138延長ティッピングレバー

～作業に使用するもの～


- ・ プラスドライバー
- ・ 10mm用スパナ \*2

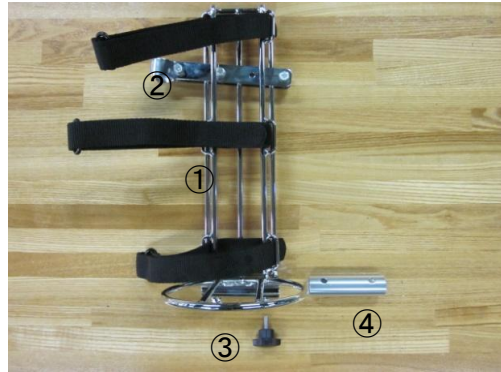

①ボンベ架を付ける側の本体ティッピングバーに延長ティッピングレバーを差し込み、固定用ボルトをスパナで締め込みます。  
固定用ボルトをスパナで固定しながらナットを締め込み、延長ティッピングレバーを固定します。



②インナーパイプを取り外したボンベ架を延長ティッピングレバーに差込みます。外したインナーパイプは標準車取り付け時に使用します。大切に保管してください。

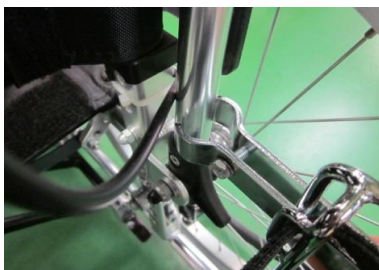

③固定用ステーのR部分を本体アームサポートフレーム後方の可能な限り上部にはめこみます。



④前頁③、④の手順で固定用ステーとノブを固定して完成。