

シート取り付け手順書




取り付け方法



① たれ部が上になるようにメインシートを車いすに掛けます。




② たれ部をフレームの隙間へ通します。

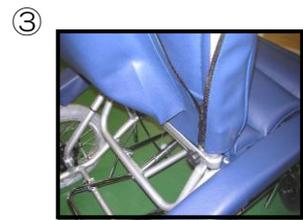


③ ポケット付シートをメインシート下側の左右ファスナーで止めてください。※ファスナーは半




④ ポケット付シートをフレーム内側に通し、メインシートたれ部裏側のマジック部に合わせます。ゆがみ、たるみが無

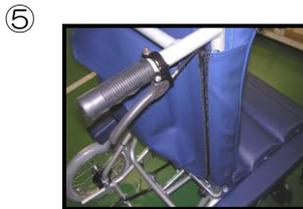

⑤ ③で半分まで上げた左右のファスナーを完全に閉めます。

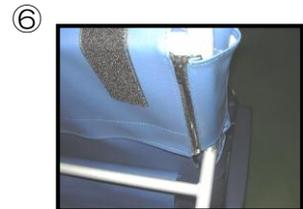

⑥ たれ部とメインシート上側の左右ファスナーを閉めます。

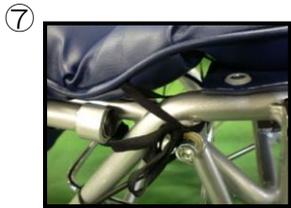


(リクライニング支点付近) (レッグレスト支点付近) (フットレスト支点付近)

フルフラットにした状態で、左右計6ヶ所のヒモを結び



⑧ 使用者の頭部に合わせて枕位置を決め、枕マジック部をメインシートマジック部

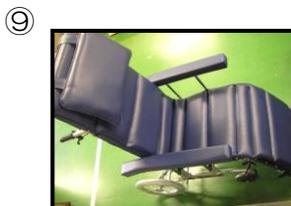

完成



注意 作業前に必ずブレーキを掛けてください。ファスナーはゆっくりと上げてください。