

MS-0025 後方用点滴棒用ホルダー

取扱説明書

この度は、本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みになり、十分に理解をした上でお使いください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。

注意・警告

- ・点滴棒の固定以外での使用はお控えください。
- ・使用される際は、使用前に必ず固定用のネジ等がしっかりと固定されているかを確認してください。
- ・車いす後方に本製品とポンペ架等その他のオプションと併用して取付される場合は、ポンペ等の重量の大きいオプションを取りつけた際、後方に転倒する危険性がありますのでご注意ください。また、移乗の際は、注意してご利用ください。
- ・直径16～φ22の点滴棒に対応しています。

はじめにご確認ください

本製品購入後に、はじめて梱包箱をあけるとときに、下記のものがすべて入っていることを確認してください。



No.	名称	個数
①	L字金具(ノブボルト含む)	1
②	点滴ボックス	1
③	ボックスホルダー(ボルト、ナット含む)	1
④	結束バンド	1

<使用工具>

- スパナ(10mm) × 1
- ニッパー × 1
- プラスドライバー × 1

取付方法

右側取付けで説明

1. 両輪の駐車用ブレーキをかけます。
2. 点滴ボックスとボックスホルダーを組み付けます(写真①)



写真①

3. 手順2で組み付けたボックスホルダーを、車椅子のティッピングバーに点滴ボックスが内側になるように差し込みます。
スパナで2箇所六角ナットを締め付けます。
※締めすぎると破断の原因になりますので、ご注意ください。



写真②

4. 結束バンドを点滴ホルダー上部の穴に通し、写真③のように車いす本体フレームと固定します。固定されていることを確認してください。



写真③

5. L字金具を背パイプに固定します。
※あらかじめ背シートを写真④のようにマジックをはがしておくと、作業がしやすくなります。

背折れジョイントの下のビス(ワイヤーガイドが固定されている)をプラスドライバーで取り外し、L字金具を写真⑤の向きにセットして、外したビスで固定します。

確実に固定されていることを確認してください。


※ワイヤーガイドと一緒に固定されていることを確認してください。
※背フレームのネジ山に合うようゆっくり締めてください。ネジ山をつぶす恐れがあります。

固定後、背シートを元の状態に戻します。

6. 点滴棒を取り付け(【使用・調整方法】参照)、固定箇所にごたつきがあるようでしたら、手順3.から緩みがないかを確認してください。

最後に余分な結束バンドをニッパーでカットします(写真⑥)。

※カットした断面で手や指を怪我しない様ご注意ください。

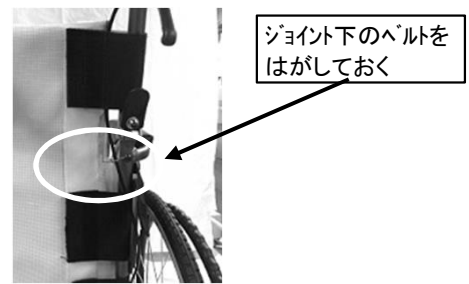

写真④



写真⑤



写真⑥

使用・調整方法

1. 点滴棒(別売り)をL字金具の上部から通し、ボックスホルダーまで差し込みます。

2. L字金具のノブボルトを締めて点滴棒を固定します。



L字金具部



ボックスホルダー部

【ボックスホルダーの位置があわない場合】

L字金具の位置を調節します。M6六角レンチでボルトを緩め、前後にスライドさせて位置をあわせてボルトで固定します。

3. 点滴棒が固定されていることを確認してください。



※写真は他機種のものが含まれます