

MS-333 アームサポートハイトアジャスター

取扱説明書

この度は、本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みになり、十分に理解をした上でお使いください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。


注意・警告

- ・使用前に必ず固定用のネジ等がしっかりと固定されているかを確認してください。
- ・アルミクランプは、パイプ径にあわせてφ14.5用、φ17.5用、φ19用(同封されているのは、いずれか1タイプのみ)がございます。パイプ径にあったものを使用してください。
- ・アームサポート固定用のボルトは2種類同梱されております。規格に合うものを使用してください。

はじめにご確認ください

本製品購入後に、はじめて梱包箱をあけるときの、下記のものすべてが入っていることを確認してください。

【片側分梱包内容】

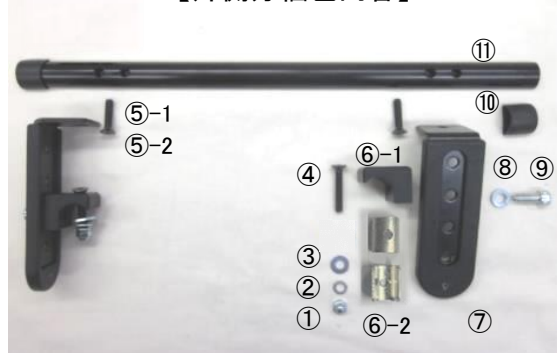

No.	名称	個数
①	M5 袋ナット	2
②	M5 スプリングワッシャー	2
③	M5 平ワッシャー	2
④	皿キャップボルトM5×30	2
⑤-1	アームサポート固定用ボルト 皿キャップボルトM5×22	2
⑤-2	アームサポート固定用ボルト 皿キャップボルトM5×25	2
⑥-1	アルミクランプ	2
⑥-2	スペーサー(φ14.5用のみ)	4
⑦	L型ステー	2
⑧	M6 スプリングワッシャー	2
⑨	M6×15 キャップボルト	2
⑩	樹脂キャップ	2
⑪	アームレストパイプ	1




<使用工具> 六角レンチ(5mm/4mm/3mm)
スパナ(8mm)

取付方法

1. 両輪の駐車用ブレーキをかけます。
2. 車いすのアームサポートを取り外します。




3. 車いす本体のアームパイプに、図に示すようにアルミクランプを取り付けます。

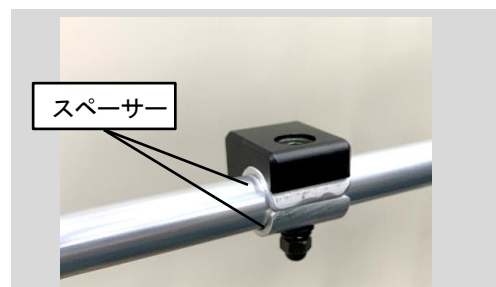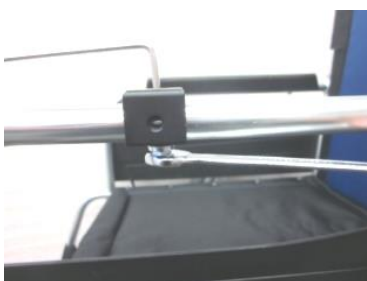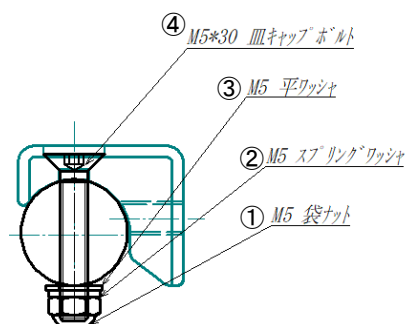


※φ14.5用では、
スペーサーをアームパイプの上下に装着し、
アルミクランプと共締めしてください。

4. 手順2で外したアームサポートに図に示すようにL字ステーを取り付けます。
車いすの仕様によってアームサポート固定用ボルトが変わります。
(「アームサポート固定用ボルトについて」参照)

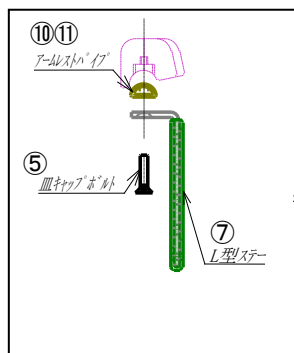

アームサポートの長さ、取り付けピッチが本製品のアームレストパイプにあわない場合
本製品のアームレストパイプの切断、穴開け等の加工が必要となります。
アームレストパイプはL=326mm、取り付けピッチは190mm、222mmになります。

5. 手順4で組み付けたアームサポートを車いすの本体に取り付けます。
希望の高さに合わせ、図に示すようにL字ステーをアルミクランプに固定します。
固定箇所にガタつきがないか確認してください。

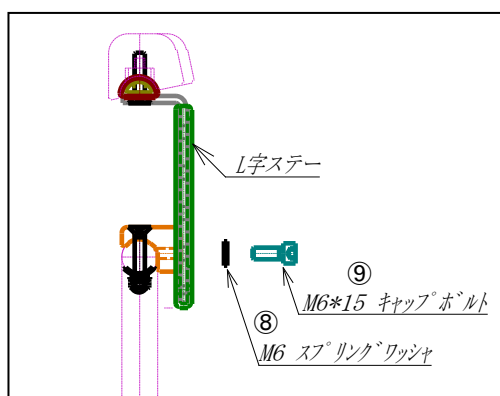

アームサポート固定用ボルトについて

車いすの仕様によって、使用するアームサポート固定用ボルトが変わります。
下記を参照にして取り付けを行なってください。

アームサポートのタイプ	使用するアームサポート固定用ボルト
ウレタン製	皿キャップボルト M5×22
木製	皿キャップボルト M5×25

販売元 株式会社 ミキ
〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号