

MS-0008 専用転倒防止バー付ボンベ架


取扱説明書

この度は、本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みになり、十分に理解をした上でお使いください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。

はじめにご確認ください

本製品購入後に、はじめて梱包箱をあけるとときに、下記のものがすべて入っていることを確認してください。

No.	名称	個数
1	ボンベ架本体	1
2	ステー	1
3	ボタンキャップボルト M6*15	3
4	M6平ワッシャ 6.2*12.8*1.0	6
5	M6スプリングワッシャ 6.2*12*1.5	2
6	M6袋ナット	2
7	転倒防止パイプ	1
8	ノブボルト M6*50	1
9	転倒防止用コマ	2
10	キャップボルト M6*60 半	1
11	M6平ワッシャ 6.5*16*2.5	2
12	M6樹脂袋ナット	1
13	M6ナット	1

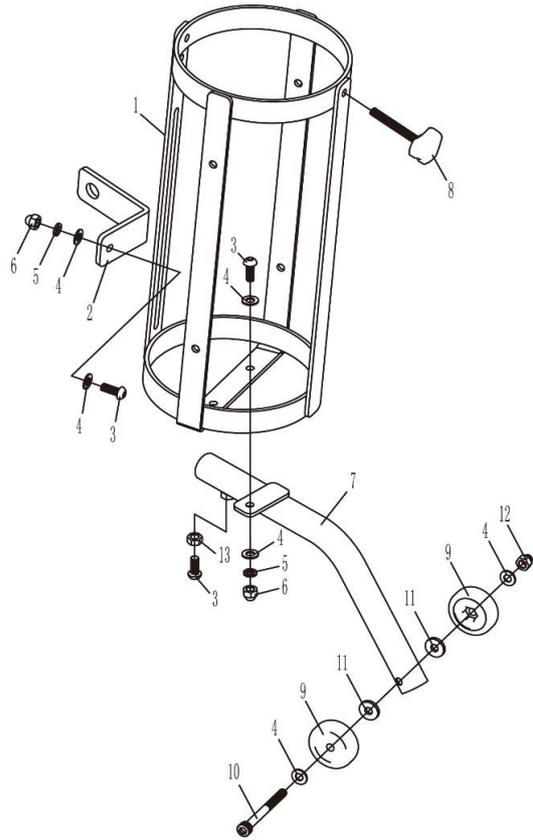

取付基準

弊社製品のFE-2、FE-3、BAL-1、BAL-3専用オプション

※上記機種と同規格品は取付可

※地面より4~5cm以上キャストが上がる場合、転倒防止金具の寸法が車体に適用していない可能性があります。使用を中止してください。

注意・警告

- ・本品の取付は、作業をしない側の駐車用ブレーキをかけ、平坦な場所でおこなってください。
- ・ボンベ設置以外での使用はしないでください。
- ・ボンベを載せる際はボンベ架がしっかりと固定されていることを確認してから載せてください。
- ・ボンベ架にボンベを装着して使用する場合は、他の荷物や重量のあるものを車いすの後方に取り付けしないでください。荷重が車いす後方に集中して、転倒事故につながるおそれがあります。
- ・ボンベを載せる場合は、押し手や背シートポケット等後方に荷重が掛からないようご利用ください。
- ・取付条件に該当しない車いすに取り付けしないでください。

作業手順

【車いす本体への取付かた】


使用工具：19mmスパナ*2、10mmスパナ*1、5mm六角レンチ*1

1. 点滴棒の受金具側の駐車用ブレーキをかけます。
2. ボンベ架本体にステア固定するボルトをレンチなどで固定しながらナットをスパナなどでゆるめておきます。


3. 取付側の駆動輪の車軸をスパナなどで固定しながら、ナットをゆるめてナット、スプリングワッシャ、平ワッシャを取り外します。外した部品は使用しますので、なくさないように注意してください。




4. ステア凹部がバックパイプにあうように、ボンベ架の転倒防止パイプをテッティングバーに差し込みます。ステアを車軸の位置に調整します。調整後、作業2の要領でステア部のナットを固定します。

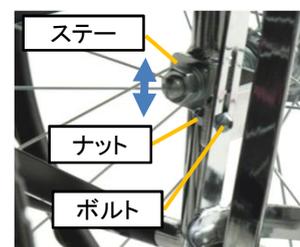

5. 作業3で外した平ワッシャ、スプリングワッシャ、ナットの順番で車軸に差し込み、作業3の要領でナットを固定します。

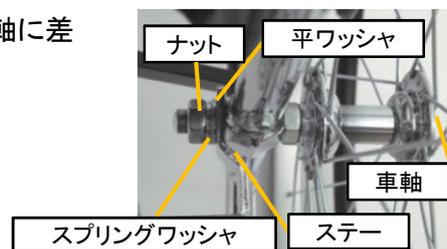

6. 転倒防止パイプ下側のボルトをレンチ等で締めます。ボルトを抑えたままナットをスパナなどで固定します。

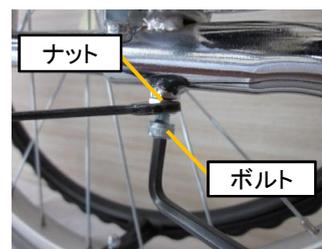

7. ボンベ架・駆動輪にガタつきがないことを確認します。また駆動輪がスムーズに回転することを確認します。

