


MS-0010 RX-1用転倒防止バー-Assy
MS-0010Lo RX-1Lo用転倒防止バー-Assy
取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みいただき、理解し適切に取扱ってください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。

注意

- ・MS-0010はRX-1、MS-0010LoはRX-1Loの専用オプションになります。
- ・本製品取り付け後、各部ネジに緩みがないことを必ず確認してください。
- ・本製品は、あくまでも後方への転倒を防ぐためのものです。目的以外の使用はしないでください。
- ・本製品の車輪が、常時接地し続ける状態で使用しないでください。

梱包内容

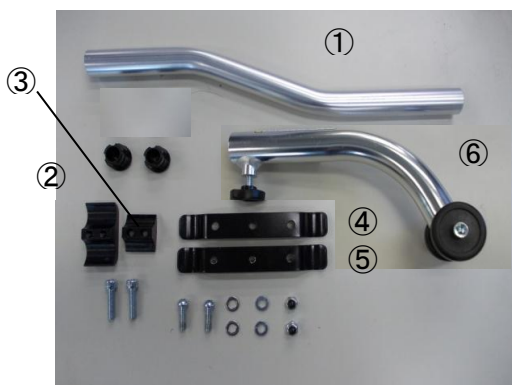

写真はMS-0010 RX-1用転倒防止バー-Assy
片側分

- ①RXオプションパイプ ×2
- ②パイプクランプ22A ×2
- ③パイプクランプ22B ×2
- ④RX転倒防止クランプA (ネジ山無) ×2
- ⑤RX転倒防止クランプB (ネジ山有) ×2
- ⑥転倒防止バー ×2
- φ22エンドキャップ ×4
- M6×25キャップボルト ×4
- M6×20ボタンキャップボルト ×4
- M6平座金(6.0*13*1.0) ×4
- M6ばね座金(6.2*12*1.5) ×4
- M6袋ナット(樹脂付き) ×4


取り付け方法

使用工具：4mm六角レンチ、5mm六角レンチ、10mmスパナ

- ① 取り付けの準備をします。



RXオプションパイプ両端にφ22エンドキャップを取り付けます。

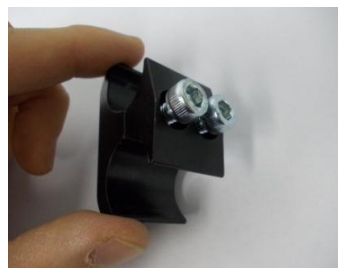

パイプクランプ22BにキャップボルトM6×25をいれ、パイプクランプ22Aと仮止めを行います。



RX転倒防止クランプABの仮止めを行います。
クランプA側からボタンキャップボルトM6×20を差しこみ、クランプB、M6平座金、M6ばね座金、M6袋ナットの順で仮止めを行います。

② パイプクランプ22ABをベースパイプに仮止めを行います。



写真は右側のベースパイプ

車いすのベースパイプに①で準備したパイプクランプABを仮止めします。

※取り付けはパイプクランプBがエックスパイプとベースパイプの間に収まる向きとし、位置は溶接部にかからないように可能な限り最後部にしてください。

③ RXオプションパイプを取り付けます。



写真:側方

写真:後方

②で仮止めしたパイプクランプABにRXオプションパイプを挿入し、5mm六角レンチを用いてキャップボルトを増締めし固定します。

※車いすのティッピングパイプ後端とRXオプションパイプの後端が面となり、かつRXオプションパイプがティッピングパイプの真下となるように調節したあと固定してください。

④ RX転倒防止クランプABを取り付けます。



車いすの内側に袋ナットがくる向きで、下部はティッピングパイプ、下部はオプションパイプに固定します。

固定位置は、クランプ部分が溶接部にかからないよう可能な限り最前方とし、4mm六角レンチでボタンキャップボルトを増締めした後、六角レンチでボタンキャップボルトを固定しながら10mmスパナで袋ナットを増締めして固定します。

⑤ 転倒防止バーを取り付けます。



RXオプションパイプに転倒防止バーを差し込み、ノブネジを締め固定します。

反対側も同様に取り付けてください。

最後にガタつきがないことを確認し、取り付け完了です。