

# MS-0013 ラクーネ用杖入れ

## 取扱説明書


この度は、本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みになり、十分に理解をした上でお使いください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。

### 注意・警告

- ・使用前に必ず固定用のネジ等がしっかりと固定されているかを確認してください。
- ・一本杖入れの固定以外の目的で使用しないでください。

### はじめにご確認ください

本製品購入後に、はじめて梱包箱をあけるとときに、下記のものが入っていることを確認してください。

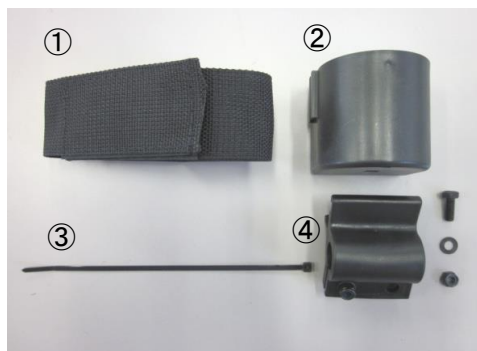

No.	名称	個数
①	固定用バンド	1
②	本体カップ	1
③	結束バンド	1
④	ボックスホルダー(ボルト、ナット含む)	1

### 取付方法

使用工具: 10mmスパナ×1、ニッパー×1、 プラスドライバー×1



1. 両輪の駐車用ブレーキをかけます。
2. 本体カップとボックスホルダーの溝を併せて組み合わせます。ボックスホルダーは、本体カップの真ん中まではめてください。



3. 手順2で組み合わせた物をテッピングレバーに差し込みます。  
※ボックスホルダーの六角穴にボルトの頭をハメ、反対側のナットをしめてください。



4. 本体カップが垂直になるよう調節し、10mmスパナで2箇所のナットを締め付け、ボックスホルダーを固定します。目安としては、自重で倒れない程度です。  
※締めすぎると破断の原因になりますので、ご注意ください。



5. 結束バンドを本体カップ上部の穴に通し、車いす本体フレームと固定します。固定されていることを確認してください。




6. 背シート最上部のビスをドライバーで一旦外します。ビスを固定バンドの穴に通し、固定バンドを挟む様に再度取り付け、固定バンドを固定します。



背折れジョイントのレバーが作業を行なうのにじゃまな場合は、レバーを横向きにして作業を行なってください。

※背フレームのネジ山に合うようゆっくり締めてください。ネジ山をつぶす恐れがあります。

7. 杖を取り付け(使用方法参照)固定箇所にガタつきがあるようでしたら、手順4から緩みがないか確認してください。

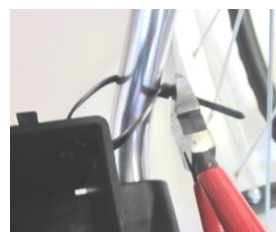

最後に余分な結束バンドをニッパー等でカットします。  
※カットした断面で手や指を怪我しない様ご注意ください。

取付完了。

## 使用方法

1. 杖先を本体カップにいれます。
2. 杖を巻くように固定用バンドのマジックを貼り合わせます。

完了

