

MS-0016 ラクーネ 2 用ポンベ架


取扱説明書

この度は、本製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みいただき、理解し適切に取扱いしてください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。

はじめにご確認ください

本製品ご購入後にはじめて梱包箱をあけるときに、下記の部品がすべて入っていることを確認してください。

品名	数量
① ポンベ架本体(内径130mm)	1
② 上ホルダー	1
③ 下ホルダー	1
④ ノブ付きボルト (M6*50 キャップボルト 全 ユニクロ)	1
⑤ U字ボルト ユニクロ	1
⑥ M6*20 ボタンキャップボルト ユニクロ	5
⑦ M6 平ワッシャー ユニクロ	6
⑧ M6 スプリングワッシャー ユニクロ	6
⑨ M6 六角ナット 1種 ユニクロ	2
⑩ M6 蝶ナット ユニクロ	2

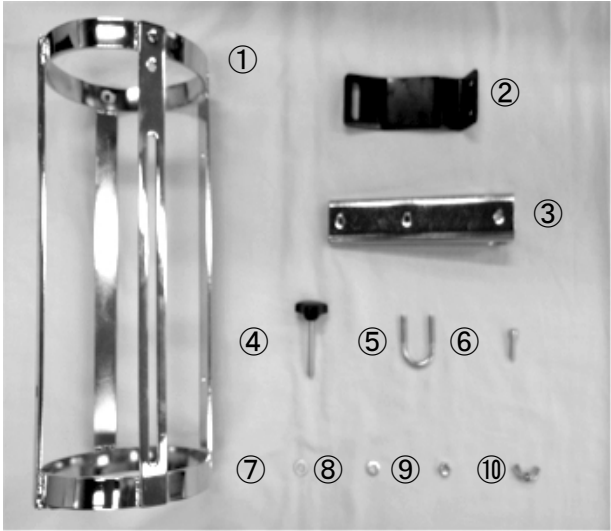


注意・警告

- ・こちらはラクーネ2専用のポンベ架となります。
- ・本製品の取付けは、駐車用ブレーキをかけ、平坦な場所で行ってください。
- ・酸素ポンベ以外は積載しないでください。
- ・ポンベを載せる際は事前にポンベ架がしっかり固定されていることを確認してください。

作業手順

〔使用工具〕 六角レンチ4mm、スパナ10mm


本説明書では「ラクーネ2用ポンベ架」をフレーム右側に取付ける作業方法を例として示します。
フレーム左側に取付ける場合も作業方法は同じになります。

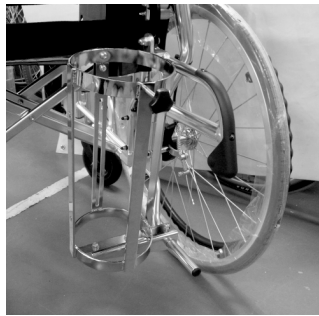

完成写真

1. 車いす本体に上ホルダーを取付ける

U字ボルトをスライドレール上部パイプの外側から入れて、上ホルダーを取付けます。

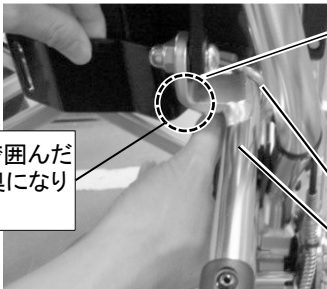


※破線で囲んだ箇所の奥になります。

⑦平ワッシャー
⑧スプリングワッシャー
⑩蝶ナット

U字ボルトを
外側から挿入

スライドレール
上部パイプ

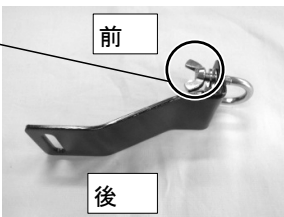

前

後





②上ホルダー

※上ホルダーの取り付け向きに注意


2.ポンベ架本体に下ホルダーを取付ける

- ①ポンベ架本体の「スリットが切られた面」の位置に注意して、ポンベ架底面の穴と下ホルダーの穴をボタンキャップボルトで固定します(2ヶ所)。
- ②ボルトにスプリングワッシャーと平ワッシャーを通してから固定してください。
- ③六角レンチ4mmで締め付けます。
- ④写真 Aの通りにボタンキャップボルトを取付けます。 ※スプリングワッシャー、ワッシャーは使いません。

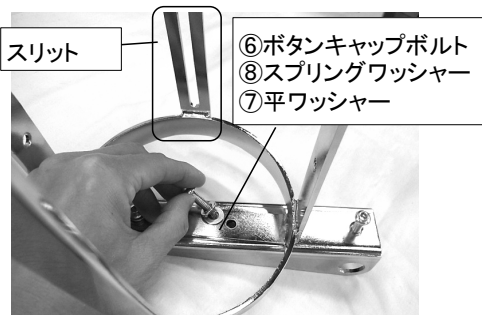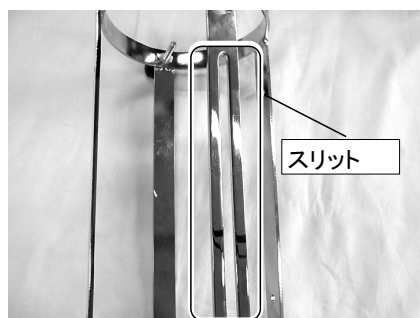

3.上ステーにポンベ架本体を取付ける


- ①下ホルダーの穴を車いす本体のティップングレバーに通します。

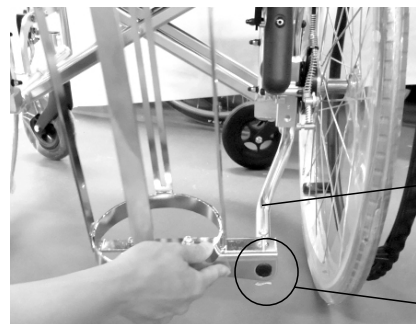

ティップングレバー

下ホルダーの穴


- ②「ポンベ架本体の穴」と「上ホルダーの長穴」をボタンキャップボルトで固定するために、ポンベ架本体の穴と上ホルダーの長穴を合わせ、ボタンキャップボルトをポンベ架側から通し、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナットを取付けます(2ヶ所)。
- ③六角レンチ4mmとスパナ10mmで締め付けます。

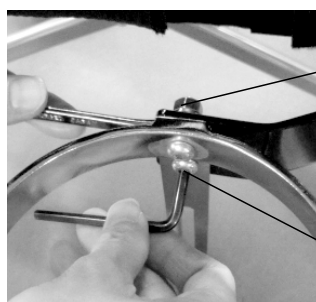

⑨六角ナット
⑧スプリングワッシャー
⑦平ワッシャー


⑥ボタンキャップボルト

- ④作業2で取付けた下ホルダーのボタンキャップボルトを六角レンチ4mmで締め付けて固定します。

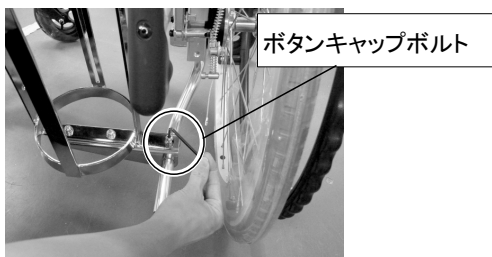

ボタンキャップボルト

- ⑤ノブ付きボルトを取付けて完成です。

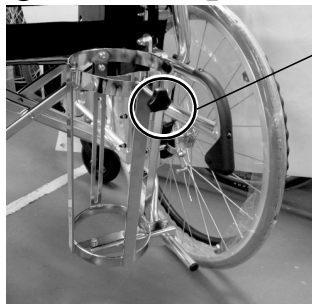

④ノブ付きボルト