



松葉杖入れ

取扱説明書

- ① 本体カップ×2個
- ② クランプ(ボルト付)
- ③ タイラップ
- ④ 固定用バンド

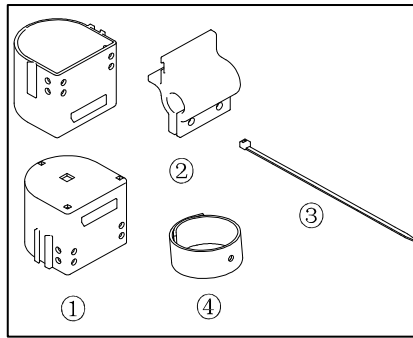


松葉杖入れ一式

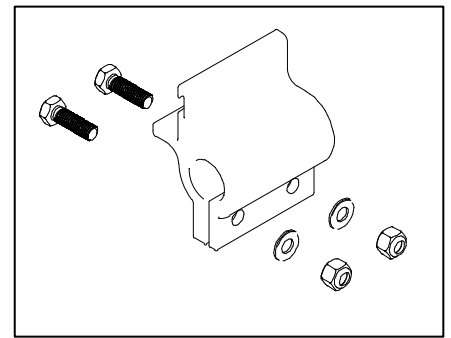

クランプ付属ボルト


組み付け方法

①

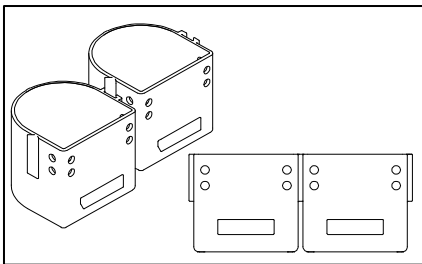


本体カップ側面の溝を合わせて上面が揃うように組み付けます。

②

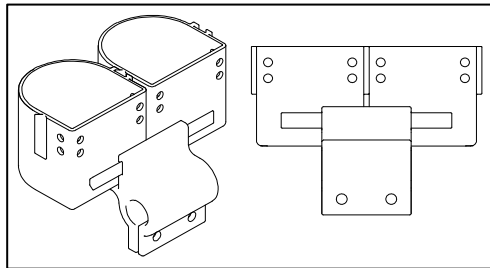


①で組み付けたものにクランプが中央にくるように取り付けます。

③

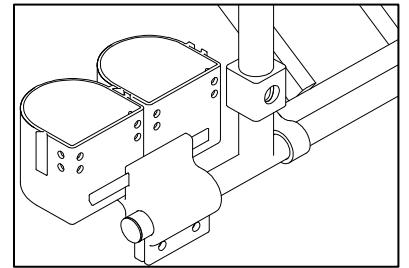

クランプを取付けたものをテッピングバーに差込みます。


④

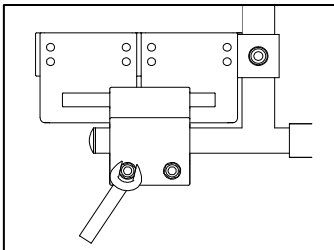

本体カップが垂直になるよう調節し、10mmスパナで2箇所ボルトを締め、クランプを固定します。締付トルクは2.0N・mです。目安としては、自重で倒れない程度です。

④ クランプの六角穴にボルトの頭をハメ、反対側のナットを締めてください。


⑤

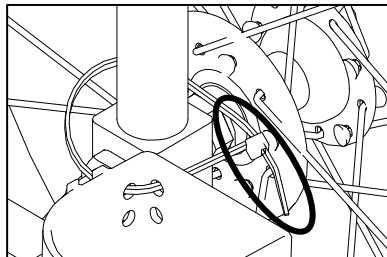

タイラップで杖入れを固定します。タイラップは締めていくと余分な箇所(図、まる)ができますので、その余分な箇所をカットします。

⑤ カットした断面で手や指を怪我しない様ご注意ください。


⑥

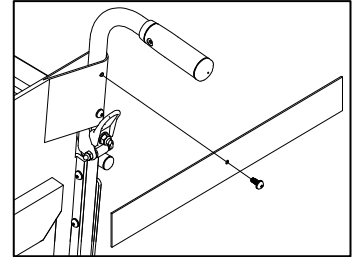

背シート最上部のビスをドライバーで一旦はずします。ビスを固定バンドの穴に通し、固定バンドを挟む様に再度取り付け、固定バンドを固定します。

⑥ 背フレームのネジ山に合わせてゆっくり締めてください。ネジ山をつぶす恐れがあります。

⑦

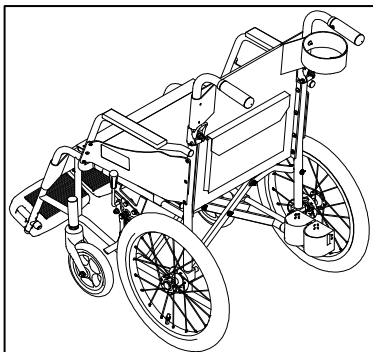

完成。