

MS-136/MS-146 ステンレス製点滴棒 (固定タイプ/高さ調節タイプ) 取扱説明書

この度は、ステンレス製点滴棒(固定タイプ/高さ調節タイプ)をお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読み頂き、確実に理解して下さい。そして適切な取扱いと保守をしてください。また本書はいつでもご覧になれる所に大切に保管して置いてください。


⚠ 警告 (MS-146 高さ調節タイプの場合)

高さ調節用の固定ボルトがしっかりと固定されていない場合、インナーパイプが中に落ちて指をはさんだり、またその衝撃で点滴針が折れ、重大な事故につながる恐れがあります。ご使用前には固定ボルトが奥まで穴に入りガタがないことを必ず確認してください。点滴をかけたままでの調節は絶対にしないでください。

⚠ 注意 (MS-136 固定タイプ/ MS-146 高さ調節タイプ共通)

通常、使用目的以外のものをかけて使用しないでください。

各部の名称 (高さ調節タイプ)

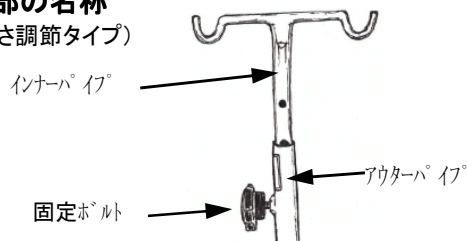

材質: ステンレス(本体)
樹脂(固定ボルト)

全長: 1.2m(固定タイプ)
1.4m(高さ調節タイプ最高時の高さ。10cm間隔で5段階に調節可能)

高さ調節方法 (MS-146 高さ調節タイプの場合)

高さ調節タイプは、10cm間隔で5段階の調節ができるようになっています。

* 固定タイプは高さ調節が不要です。

⚠ 警告 合せ位置以外での調節および固定ボルトが奥まで穴に入っていない状態でのご使用は絶対に避けてください。

1. 固定ボルトをゆるめ、お好みの高さに合わせてインナーパイプを上下にスライドします。
2. インナーパイプの穴の中央にアウターパイプの端面をあわせ、固定ボルトを右に回し、穴に入れ固定して下さい。

* 調節後はボルトが奥まで穴に入りガタがないことを確認してご使用ください。

合せ位置



製造元

1208-005

販売元

 **Miki** 株式会社 ミキ
〒457-0863名古屋市南区豊三丁目38番10号
Tel: (052) 694-0333
URL: www.kurumaisu-miki.co.jp