

この度は、弊社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
本製品に同梱されています取扱説明書に補足がございますので、以下の内容を併せてお読みください。

安全上のご注意



(取扱説明書 P.6) (クイックガイド P.3)

⚠ 警告

車いすの操作、取り扱いについて

❌ 車いすの移動、持ち運び、積み下ろしの際は、落下させたり、投げ出したり、急に前後に動かしたりしない。

主輪(ホイール)が停止状態から急回転するような衝撃を与えると、モータの破損や故障の原因となります。

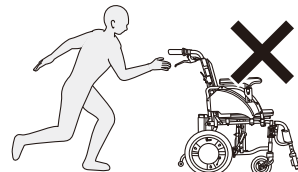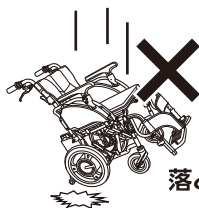

❗ 車いすを持ち運ぶ際や、自動車などへ載せる際および積み下ろす際は、必ず両輪の駐車用ブレーキをかけて、主輪(ホイール)が回転しない状態で行う。

車いすに大きな衝撃を与えないよう、ゆっくりと静かに降ろしてください。

警告・エラー表示について

(取扱説明書 P.28/P.29) (クイックガイド P.7/P.8)

警告一覧

コード	ブザー音	電源スイッチ部	状況	対処方法
5	ピピピッ ピピピッ… (連続)	 (変化なし)	右側グリップを握らない (握った検知をしていない) 状態で、いずれかのボタン スイッチを押した時に発生。	グリップから手を離してください。そのあと、再度グリップを握ってボタンスイッチを押し直してください。 手袋を装着している場合は、手袋を外すか、薄手の手袋にはめ替えてください。

エラー一覧

コード	ブザー音	電源スイッチ部	速度表示ランプ	状況	対処方法
14	ピッ(×8) ポー… (連続)	 点滅	 (停止時) 1段目と3段目 点滅	モータの配線に異常があったときに発生。	本体の電源を切ってください。そのあと、ただちに使用を中止して、販売店にお知らせください。

困ったときには

(取扱説明書 P.31)

症状	確認点	対処のしかた
ボタンスイッチ部を操作しても、主輪が動かない。	バッテリーが残量切れをおこしていませんか。	バッテリーを充電してください。
	厚手の手袋を装着していませんか。	手袋を装着している場合は、手袋を外すか、薄手の手袋にはめ替えてください。 手袋の種類によっては、静電容量検知グリップの反応がしなくなったり、にぶくなる場合があります。

製造元