

FE-4

標準形自操用手動車いす 122203(JIS T0102)

取扱説明書

ご使用前に本書と別冊「標準車いす取扱説明書」を必ずお読みになり、十分に理解した上でお使いください。また、本書はいつでもご覧になれる所に大切に保管しておいてください。使用者の身体状況・環境の変化に合わせて、必要なときに本書をお読みください。

使用目的・特徴

本製品は手動式車いすで、一人乗り用です。

これに搭乗しての移動と、休息を目的としています。

本製品は、特別な身体保持具、バックサポート(背)・座位の角度調整機構等がなく、使用者がハンドリムを操作して駆動する手動式の自走用標準型車いすです。

日常生活用に設計されており、特殊な使用目的(スポーツ・入浴など)のものではありません。

はじめにご確認ください

本製品購入後に、はじめて梱包箱をあけるとときに、下記のものが入っていることを確認してください。

- ・車いす本体
- ・取扱説明書(本書)、標準車いす取扱説明書 各1冊
- ・工具(5mmレンチ 1ヶ)
- ・保証書

⚠ 警告

手押しハンドル、本体フレームおよびバックサポートに重いものを吊り下げたり、入れたりしないでください。過度の荷物はバランスを崩し、転倒するおそれがあります。

各部使用方法


専用点滴棒受け

車いす後方に点滴棒の受け金具が標準装備されております。

⚠ 注意

- ・点滴棒設置以外の使用はお控えください。
- ・車いす後方にポンベ架等の重量の大きいオプションと併用される場合、後方に転倒する危険性がありますのでご注意ください。また、移乗の際は、注意してご利用ください。
- ・点滴棒の径はφ22まで対応しております。
- ・点滴棒(MS-136、MS-146)は別売りになります。

【点滴棒の取付かた】

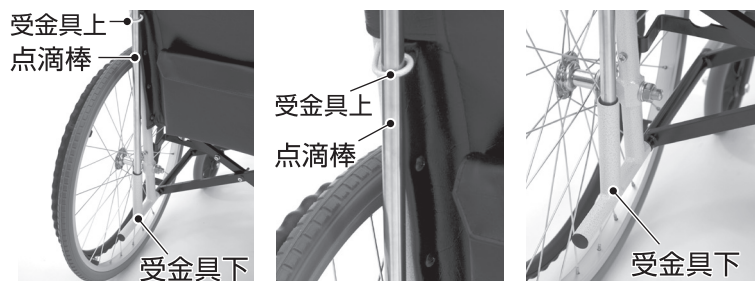


1. 受金具上から受金具下まで点滴棒を挿入します。

仕様・寸法

【仕様】

フレーム材質	鉄	シート幅	400
シート材質	ポリエチレン 塩化ビニル ポリエステル	全幅	630
グリップ	エンボスグリップ	フットサポート・シート間距離	360±20
バックサポート	スリング	全高	845
背折れ	なし	全長	975
アームサポート	ウレタン	バックサポート高	380
サイドガード	樹脂	後座高	410
足台可動	固定	シート奥行	400
フットサポート	軽量ステップ 黒	アームサポート高	220
キャスタ	6"ソリッドキャスタ	前座高	435
タイヤ	22PU	駆動輪径	22 インチ
ドラム		キャスタ径	6 インチ
ハンドリム		折りたたみ時の全長	955
駐車用ブレーキ		折りたたみ時の全高	845
		折りたたみ時の全幅	320
		重量	14.2 kg

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専用の転倒防止バー付ボンベ架をご用意しております。(別売り) カゴの内径φ130mm



【車いす本体への取付かた】