



# シート取り付け手順書



## 取り付け方法

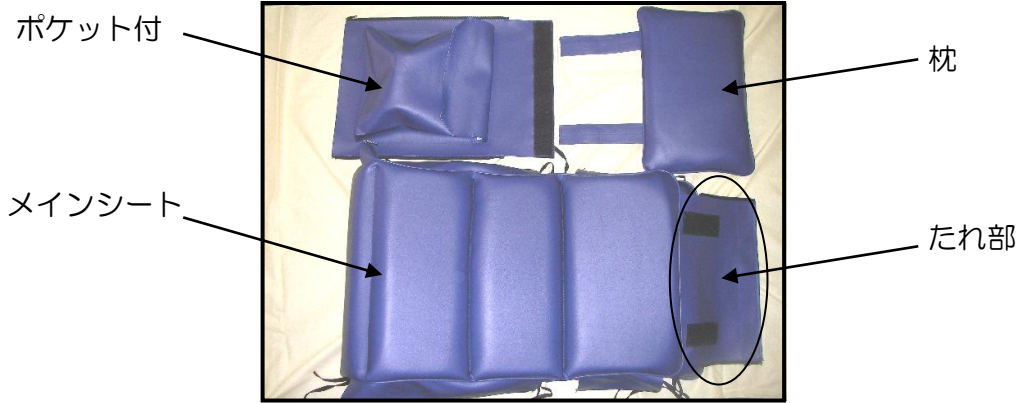

たれ部が上になるようにメインシートを車いすに掛けます。

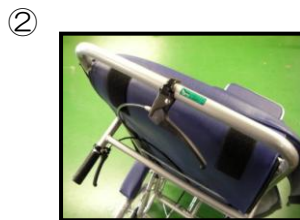


たれ部をフレームの隙間へ通します。




ポケット付シートをメインシート下側の左右ファスナーで止めてください。※ファスナーは半





ポケット付シートをフレーム内側に通し、メインシートたれ部裏側のマジック部に合わせます。ゆがみ、たるみが無

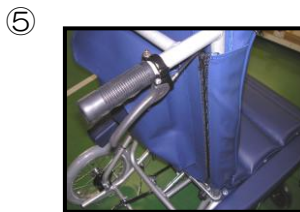

③で半分まで上げた左右のファスナーを完全に閉めます。

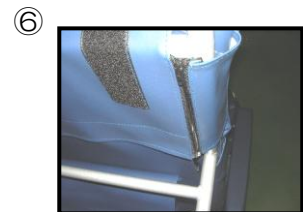

たれ部とメインシート上側の左右ファスナーを閉めます。

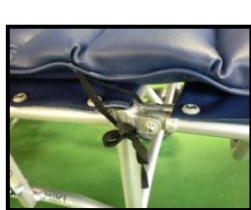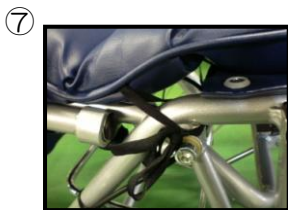


(リクライニング支点付近) (レッグレスト支点付近) (フットレスト支点付近)


フルフラットにした状態で、左右計6ヶ所のヒモを結び



使用者の頭部に合わせて枕位置を決め、枕マジック部をメインシートマジック部

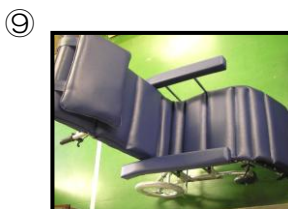

完成

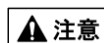

**注意** 作業前に必ずブレーキを掛けてください。ファスナーはゆっくりと上げてください。