


MS-0009 スマートヘッドサポート 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みになり、十分に理解をした上でお使いください。また、本書はいつでもご覧になれる所に大切に保管しておいてください。使用者の身体の状態・環境の変化に合わせて、必要なときに本書をお読みください。

はじめにご確認ください

本製品購入後、はじめて梱包箱を開けるときに、下記のもの全ては入っていることを確認してください。

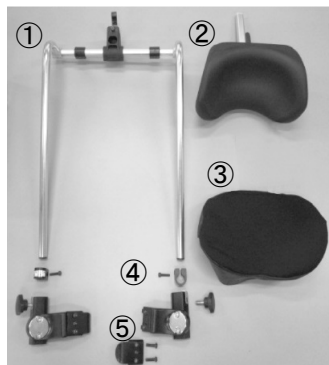

【梱包内容】

- ① ヘッドサポートフレーム ×1ケ
- ② 枕部 ×1ケ
- ③ 専用枕カバー ×1ケ
- ④ ストッパー L/R一式 ×各1ケ(拡大図はL側)
内訳 a.ストッパー ×2ケ
b.キャップボルトM5×20 ×2ケ
- ⑤ 受金具一式L/R ×各1ケ
内訳 c.受金具A L/R ×各1ケ(拡大図はL側)
d.ノブボルトM8×20 ×2ケ
e.受金具B ×2ケ
f.ボタンキャップボルトM6×25 ×4ケ
g.平ワッシャーM5 ×2ケ
h.ナベネジM5×10 ×2ケ



【④拡大図】



【⑤拡大図】

【仕様】

材質	枕部: 独立気泡ポリエチレンフォーム フレーム部: アルミ 受金具部: アルミ(一部鉄) 枕カバー: ポリウレタン
重量	2.6kg



枕側面にみられるバリは、製造過程でできるもので不良品ではありません。
バリをカッター等で切り落とすような加工は行わないでください。
破損の原因となります。

注意・警告

- ・枕の上下・左右・前後の位置および角度の調整を行なった場合は、可動部がしっかりと固定されていることを確認してください。
- ・本製品にバック等重いものを吊り下げないでください。
- ・本製品を手押しハンドルとして使用しないでください。
- ・車いすを折りたたむ際は、ヘッドサポートフレームを受金具から外してください。
- ・枕に突起物を強くあてないでください。変形の原因となります。
- ・枕の形状を変更するような加工はしないでください。破損の原因となります。
- ・枕に荷重がかかる状態で保管しないでください。変形の恐れがあります。
- ・ヘッドサポートフレームを受金具に差し込む際に、ストッパーと受金具の間で身体、および衣服を挟まないように注意してください。

特徴

- ・バックサポートパイプ径Φ22に取付対応。
- ・車いすの背角度、座幅(取付可能座幅300～440mm 一部特殊フレーム除く)に合わせて取付が可能。
- ・利用者の状態に合わせて、枕の上下・左右・前後の位置、および角度をそれぞれ独立して調整が可能。

取り付け方法

取り付け前の準備 使用工具: 4mm六角レンチ



①.ストッパー(④-a)にキャップボルト(④-b)を仮止めしてください。



②.キャップボルトの頭が内側にくるようにストッパーをヘッドサポートフレーム(①)に差し込んでください。



③.ヘッドサポートフレームのクイックリリースを手前に倒し、枕部(②)を左写真のように差し込みます。



準備完了。

1.車いす本体に受金具一式を取り付けます。

使用工具: プラスドライバー、4mm六角レンチ、3mm六角レンチ、8mmスパナ



①.車いす本体の背シートを固定しているビスをプラスドライバーを使用して外します(外したビスはこのあと使用しません)。

平ワッシャー(⑤-g)とナベネジ(⑤-h)で、車いす本体に固定します。

※受金具B(⑤-e)は背シート上部先端よりも下にくるように取り付けてください。
※反対側も同様に取り付けを行います。



【作業ポイント】

背パイプの径と受金具Bが合わない場合

写真左のナットを8mmスパナで緩めて爪を前後にスライドして調整してください。

調整後は緩めたナットを締めて固定してください。



ボタンキャップボルト 受金具B

②.受金具Bと受金具A(⑤-c)を写真左のようにあわせ、2箇所の穴にボタンキャップボルト(⑤-f)を通し、4mm六角レンチ等を使用して固定します。

※反対側も同様に取り付け作業を行ないます。

※しっかりと固定されていることを確認してください。

2.ヘッドサポートフレームの幅を調整します。

使用工具: 3mm六角レンチ



ボタンキャップボルト

①.2箇所のボタンキャップボルトを3mm六角レンチで緩めます。ヘッドサポートフレームを左右にスライドさせ、手順2で取り付けしたクランプにヘッドサポート本体を差し込み、フレームの幅を調整します。任意の位置が決まったら、緩めたボタンキャップボルトを締めます。

※しっかりと固定されていることを確認してください。

3. 枕の高さを決めます。

使用工具: 4mm六角レンチ



①. ヘッドサポートフレームを上下にスライドさせ、任意の位置に枕の高さをあわせ
ます。
位置が決まったら、緩めた左右のノブボルト(⑤-d)をしっかり締めて固定してくだ
さい。

②. 左右のストッパーを受金具の上にあわせ、キャップボルトを4mm六角レンチで締
め固定します。



しっかりと固定されていることを確認してください。

取付完了。

各部の調整

【ヘッドサポート取り付け角度の調整】

車いすの背角度にあわせて、ヘッドサポートとの取り付け角度が調整できます。

使用工具: 5mm六角レンチ



左右のキャップボルト(写真左)計4本を5mm六角レンチで緩め、ヘッドサポートの
角度を任意の位置にあわせてください。

位置が決まったら、緩めたキャップボルトの全てをしっかり締めて固定してください。

※しっかりと固定されていることを確認してください。

【枕の左右・前後位置の調整】

利用者の状態に合わせて、枕の位置を左右・前後に調整できます。



クイックリリースのレバーを倒します。
枕の位置を左右・前後にスライドさせ、任意の位置にあわせませ
す。

位置が決まりましたら、クイックリリースのレバーを起こし、固定します。

※しっかりと固定されていることを確認してください。

【枕の角度の調整】

利用者の状態に合わせて、枕の角度が調整できます。



固定ボルトのレバーを左回りにまわし緩めます。枕の角度を任意の位置にあわせ
ます。

位置が決まったら、レバーを右回りにまわし固定します。

※固定ボルトのレバーを引き上げてまわすと空回りをし、レバーの位置を調整
できます。

専用枕カバーの取り付けかた

【取付方法】



①.写真のように枕カバー(③)を枕にかぶせます。



②.カバー側面の面ファスナーをあわせませす。



③.取付完了。

お手入れ・保管について

●ヘッドサポートフレーム・受金具のお手入れ

・汚れは、タオルかスポンジに中性洗剤を含ませて拭き取ってください。拭き取った後は、乾いた布で水分を拭き取ってください。

●枕部のお手入れ

- ・汚れは、柔らかい布やスポンジに中性洗剤を含ませてやさしく拭き取ってください。拭き取った後は、洗剤が残らないように水で洗い流し、水分を布で拭き取ってください。
- ・シミや汚れがひどい場合は薄めた塩素系漂白剤を染み込ませた布で拭き取ってください。
- ・シンナー、ベンジン等揮発性の高い溶剤は、使用はしないでください。製品を傷める恐れがあります。

●保管について

- ・直射日光が当たる場所には保管しないでください。
- ・湿気の高い場所や室温の上がる場所には保管しないでください。
- ・本製品を積み重ねて保管しないでください。枕部の変形、フレームの破損の恐れがあります。
- ・枕を凹凸面上に置かないでください。変形の恐れがあります。
- ・火気を近づけないでください。
- ・枕に荷重がかかる状態で保管しないでください。変形の恐れがあります。

本製品の廃棄については、最寄りの行政担当窓口におたずねください。