

# MS-131 延長用レバー(ロング・ショート)

## 取扱説明書

この度は、本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みになり、十分に理解をした上でお使いください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。

### 注意・警告

- ・ブレーキノブを取り外した状態で使用しないでください。
- ・取付部にゆりみがないか、定期的に点検してください。
- ・弊社製品の、右の駐車ブレーキに取付可能です。  
それ以外のブレーキには取付できません。



引き式タッグルブレーキ



PNブレーキ



BAL用ブレーキ

### はじめにご確認ください

本製品購入後に、はじめて梱包箱をあけるときの、下記のものが入っていることを確認してください。



①ロング




②ショート

※①②のいずれかが梱包されています。

No.	名称	個数
①	延長用レバー (ロング:100mm延長)	1
②	延長用レバー (ショート:50mm延長)	1

## 取付方法

①

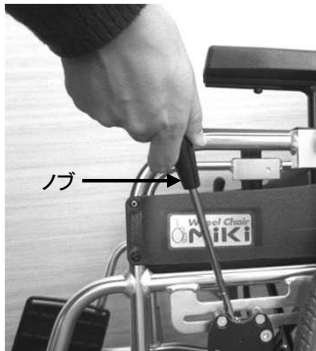

駐車ブレーキに付いているノブを外します。反時計回りに回しながら、引き抜くように外します。

②



延長用レバーを駐車ブレーキの先端に差し込み、右回し(時計回り)にネジ込みます。

③



取付完了  
取り外しは、取り付けの逆の手順で行ってください。

## 仕様

	延長用レバー(ロング)	延長用レバー(ショート)
材質	アルミ、樹脂	アルミ、樹脂
全長	140mm	97mm
重量	36g	31g

本製品の廃棄については、最寄りの行政担当窓口におたずねください。