

# 点滴棒受け 取扱説明書

この度は、点滴棒受けをお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みいただき、理解し適切に取扱いしてください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。

## 注意、警告

- ・点滴棒以外での使用はお控えください。
- ・点滴棒受けを使用される際は、使用前に必ず固定用のボネ等がしっかりと固定されているか確認してください。
- ・車いす後方にポンペ架等その他のボネと点滴棒を併用取付けされる場合は、可能であれば点滴棒は後方ボネの前方対角線上に取付けてください。両方共に後方に取付けされる場合は、ボネ等の重量の大きいボネを取付けた際、後方に転倒する危険性がありますのでご注意ください。また、移乗の際は、注意しご利用ください。
- ・本書に記載のボネ(点滴棒受け前方取付け型、点滴棒受け後方取付け型)は別売になります。必要に応じて、各種お買い求めください。
- ・弊社車いすに他社製のオプションは対応しておりません。使用しないでください。

## 各種名称

### ・点滴棒受け ～前方取付け～



- ①受け金具
- ②M6平ワッシャー
- ③U字ボルト
- ④17°リングワッシャー
- ⑤蝶ナット
- ⑥ボルト

### ・点滴棒受け ～後方取付け～



- ①L字金具
- ②受け金具
- ③平ワッシャー
- ④U字ボルト
- ⑤17°リングワッシャー
- ⑥蝶ナット
- ⑦ボネ

## 点滴棒受け 組付け作業手順

### 点滴棒受け ～前方取付け～



- ①. 左写真に示すよう受け金具が車いすの外側になる様70mmに押し当て、U字ボルトで70mmを挟み、蝶ナットで位置がずれない程度で仮止めします。この時、出来るだけ上側に取り付けてください。



- ②. 点滴棒を受け金具に挿入します。この時、点滴棒がキャストに干渉しないよう受けの向きを調節してください。キャストで止まる位置に合わせてください。向きを合わせたら蝶ナットを締め込んでください。



- ③. 最後にもう一度キャストに点滴棒が干渉しないか確認してください。干渉していなければボネを締め付け完成です。※左右とも作業は同様です。

### 点滴棒受け ～後方取付け～



- ①. 左写真に示すよう受け金具を車いすの内側からティップバーに押し当て、U字ボルトでティップバーを挟み、蝶ナットで位置がずれない程度で仮止めします。



- ②. 背ボネの一番上段のビスを取り外し、内側向きにL字金具を固定し、2本の横溝の上側の固定穴に先ほど外したビスを通し再度取付けます。



- ③. L字金具に点滴棒を挿入し、受け金具に合うよう調節用ボルトを緩め、調節します。この時出来るだけ、地面と垂直になる様調節してください。調節し終わったらボネ締め付けてください。



- ④. しっかりと受け金具に点滴棒が収まっていることを確認し、ボネで締めつけて完成です。※左右とも作業は同様です。

※サンプル車には、オーダー車を使用。