

# アンダートレー 樹脂製（ネクストローラー用）

## 取扱説明書

この度は、本製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みいただき、理解し適切に取扱いしてください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。

### はじめにご確認ください

本製品ご購入後にはじめて梱包箱をあけるときに、下記の部品がすべて入っていることを確認してください。

	品名	数量
①	アンダートレー	1
②	デュアルロックファスナー	1
③	「踏まないで下さい」ステッカー	1



【完成写真】

### ※注意

- ・座幅毎にアンダートレーの全幅が異なります。
- ・アンダートレーは表裏があります。（表：シリアルナンバー無し、裏：シリアルナンバー有り）

アンダートレーのサイズ
280*550*6.5
320*550*6.5
360*550*6.5

### 注意・警告

- ・本製品の取付けは、駐車用ブレーキをかけ、平坦な場所で行ってください。
- ・本製品は呼吸器を積載することを目的としております。呼吸器以外は積載しないでください。
- ・呼吸器を載せる際は事前に呼吸器がしっかり固定されていることを確認してください。
- ・ポンベ架など併用される場合は、アンダートレーとの干渉にご注意ください。
- ・こちらはネクストローラー専用のアンダートレーとなります。他の商品には取付けないでください。
- ・積載物の重量配分には、十分に注意してご使用ください。
- ・最大積載荷重：20kg

### 作業手順

〔使用工具〕 はさみ


#### 1.アンダートレーにデュアルロックファスナーを貼付ける

- ①デュアルロックファスナーを必要な長さにカットしたものを3枚用意します。


座幅	デュアルロックファスナー長
380mm	280mm2枚 320mm1枚
420mm	320mm2枚 360mm1枚
460mm	360mm2枚 400mm1枚




- ②デュアルロックファスナー1枚(例：座幅420mmの場合、360mmにカットしたものを)を長手方向に等間隔でカットします。

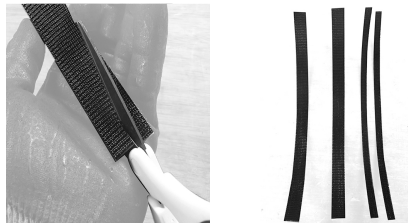


- ③カットしたデュアルロックファスナーを本体フレームに貼付けます。  
※貼付ける際、溶接盛りに干渉しないようご注意ください。

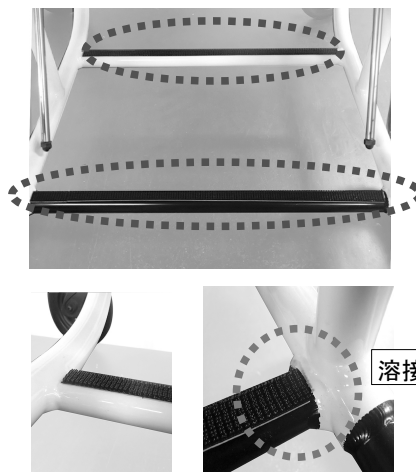

- ④アンダートレーの裏側に、端から75mm、325mmの位置に目印を付けそこにデュアルロックファスナーを貼付けます。

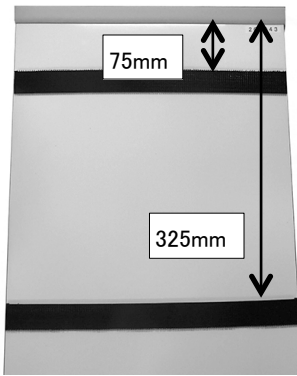

※重要※ しっかりと貼付けるため  
必ず手で圧着してください。

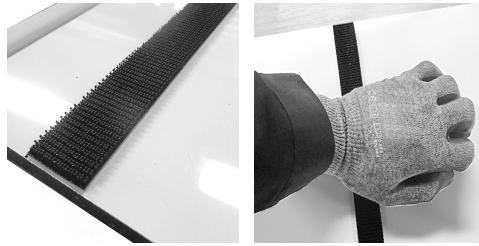


## 2.本体フレームにアンダートレーを取付ける

- ①本体フレーム中央にアンダートレーを載せ

取付け位置を確認します。

その際、本体側とアンダートレー側の

デュアルロックファスナーが重なることを確認します。

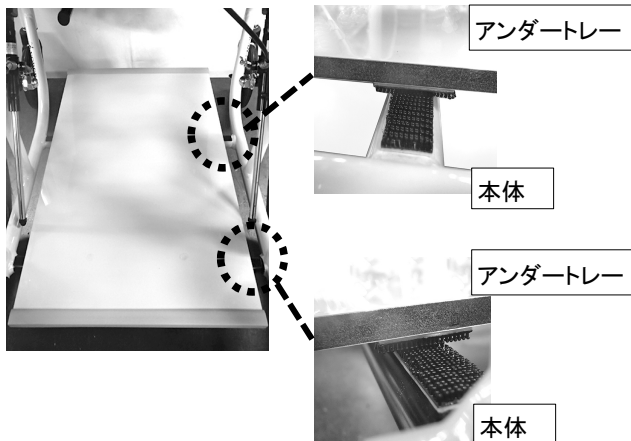

- ②位置を決めたらアンダートレーの上から手で叩いて圧着し、


デュアルロックファスナー同士をかみ合わせます。

※強く叩きすぎて傷を付けないようご注意ください。



- ③アンダートレーの後端中央に

「踏まないで下さい」ステッカーを貼り付けます。

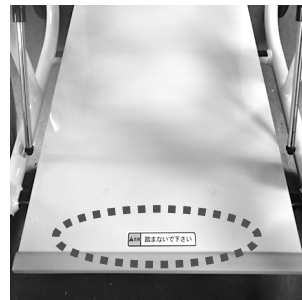

- ④アンダートレーの端を持って上に引っ張り

アンダートレーが外れたり左右に動かないことを確認します。

