

その他装備

特に際立つサニタリー車いすの装備群。とても機能的です。

ワンプッシュ式ステップ

これまでの車いすではビスで固定されているので、ステップの高さ調整にとて
も手間がかかっていました。
ワンプッシュ式ステップは面倒な高さ調整がワンタッチで簡単にできるよう
になりました。



調整がワンタッチで簡単

ウェーブ型ハンドリム

手にフィットする波型のハンドリム。
握力の弱い方でも大きな波型が引ッ
かかり駆動をしやすくなっています。



ハイポリマータイヤ 上記写真 ▲

メンテナンスフリーのノーパンクタイヤ。パンクや空気漏れの心配がないので、
とても便利です。

オプション

より快適な使用感を目指し、
様々なシーンを想定して開発されたオプションパーツ。

MS-0017 キャストラック取付用点滴棒ホルダー(前方用)

従来では取付けできなかったスィン
グアウト車いすにも装着可能になり
ました。(キャストラック径φ25)
点滴棒径φ16～22mmに対応
※新車装着時は、取付位置(左右)の指定が
必要です。



¥5,000 (非課税価格)
部品価格 ¥5,500 (税込)

MS-0022 杖入れ(1本用)

車いすで、杖を携帯する際に使用し
ます。(ティッピングパイプ径φ17.5・
19・22) 重量/120g
※注文の際、機種のご指定が必要です。
※新車装着時は、取付位置(左右)の指定が
必要です。



¥2,750 (非課税価格)
部品価格 ¥2,500 (税込)

※掲載の価格は非課税価格です。 21.03

 **株式会社 ミキ**

会社や商品についての情報の確認は、MIKIホームページまで▶
<http://www.kurumaisu-miki.co.jp/>



商品に関するお問い合わせは 株式会社 ミキ お客様サポート窓口 まで
TEL 0570-00-3993 FAX 0568-66-6335
※愛知県への通話料が発生します。

〒484-0928 愛知県犬山市宇七ツ屋51-3

お問い合わせ

仕様および価格は、製品の改良のため予告なく変更される場合があります。印刷の都合上、実物と色が異なる場合があります。■当社製造商品は生産物賠償責任保険に加入しております。

サニタリー車いす エスティーアール・
ジェーティーエヌ シリーズ

STAR・JTN series

楽々シート交換 / 抗菌加工シート / 足踏み連動式駐車ブレーキ

安全・安心、
さらに清潔なサニタリー車いす。
汚れた座シートをサッと交換できます。

とても
衛生的

抗菌加工シート車追加!




 **Wheel Chair
Miki**

車いすは日々使うものだからこそ、簡単なお手入れで清潔に保ちたい。

- 1 車いすで「失禁をする・飲食物をこぼす」事はありませんか？
汚れたシートの後処理が大変ですね……。

😊汚れた座シートを
サッと交換できます！

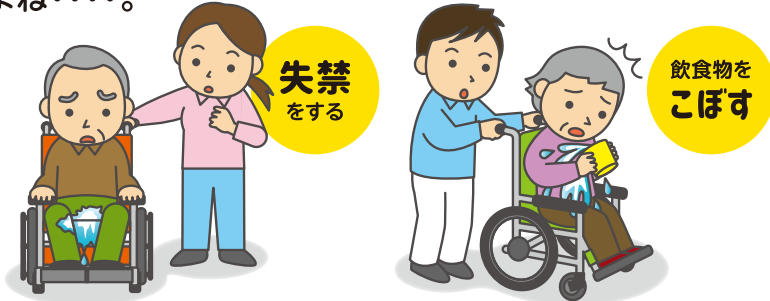

いつも清潔。簡単に交換できるビスなしシート。

これまでの車いすでは座シートが汚れた場合、除菌消臭スプレーなどを吹き付けて布で拭うだけでした。また、シート交換する場合はビスで固定されているために取り外しに手間がかかっていました。サニタリー車いすはビス止めがないので、交換に要する時間がわずか約10分の1に短縮。簡単で面倒な作業ではなくなりました。背シートもマジックテープを剥がして引き出すだけで簡単に交換ができます。



背シートも引き出すだけで交換ができます

サニタリー車いす



1 シートを引き上げる



2 キャップを外す




3 汚れた座シートを引き出す



4 新しい座シートに差し替え、キャップを付ける

- 2 室内に入る時の車いすのタイヤ清掃は、とても面倒ではありませんか？
特にキャストに絡まった髪の毛やホコリをとるのは大変ですね……。

😊キャストが取り外せて、
掃除が簡単です！

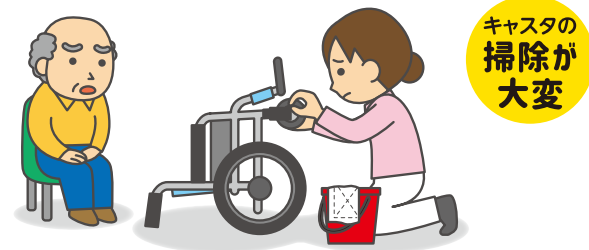

ワンタッチキャストは、キャストのメンテナンスが容易にできます。

特にキャストは地面により近い分、髪の毛やホコリが絡まりやすくなります。ワンタッチキャストは、キャストをキャストフォークから簡単に取り外せるため、容易に掃除ができます。室内にゴミを持ち込むことなく清潔です。

サニタリー車いす



1 キャスタのロックを外す



2 バーを下げる



3 キャスタをキャストフォークから取り外す

※キャストの取り付け方が正しく使えているのか不安な場合は、販売店にご相談ください。

- 3 住宅や施設など生活空間において、清潔・衛生的な環境作りが求められてきています。
これらのニーズを受け、車いすのシート全面に抗菌加工を施しました。

😊衛生的機能をプラス。
抗菌加工シート車！



シート表面



STR-1

シート表面に付着した菌の増殖を抑え、著しく減少させることが可能です。

シート表面に付着した菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、MRSA)の繁殖を抑えられ、著しく減少させることが可能な抗菌加工シート車をラインアップ。シート表面はとても衛生的に保たれ、安心してご使用いただけます。抗菌加工シートの安全性は、下記の試験機関が抗菌力試験にて証明しています。

■合成革皮 抗菌力試験結果(参考資料)

- 検 体 … 合成革皮
- 試 験 方 法 … JIS Z 2801検体の表面に試験菌液を滴下し、35℃で24時間保存後の生菌数を測定。無加工の試験片※を同様に試験し比較。
※ポリエチレンフィルムを使用基準値：抗菌活性値2.0以上に
- 試 験 概 要 … 上記試験方法を参考にして、検体の抗菌力試験を行った。なお、検体は清浄化を行わずに試験に供した。
- 実 施 施 設 … 一般社団法人日本食品分析センター 彩都研究所
- 試験開始日 … 2020年10月23日
- 試 験 結 果 … 結果を表-1に、抗菌活性値(参考値)を表-2に示した。

表-1
試験片の生菌数測定結果

試験菌	測 定	試験片	試験片1個当たりの生菌数		
			測定-1	測定-2	測定-3
黄色 ぶどう 球菌	接種直後	無加工	3.3×10 ⁵	3.6×10 ⁵	2.7×10 ⁵
	35℃	無加工	2.4×10 ⁶	2.0×10 ⁶	2.6×10 ⁶
	24時間後	検体※1	検出せず<10	検出せず<10	検出せず<10
大腸菌	接種直後	無加工	2.7×10 ⁵	2.4×10 ⁵	3.3×10 ⁵
	35℃	無加工	2.4×10 ⁷	1.9×10 ⁷	1.8×10 ⁷
	24時間後	検体※1	検出せず<10	検出せず<10	検出せず<10

○黄色ぶどう球菌：Staphylococcus aureus subsp. aureus NBRC 12732
○大腸菌：Escherichia coli NBRC 3972 ○無加工試験片：ガラス板
※1：24時間保存後、菌液が検体に一部吸収されていた。

表-2
抗菌活性値(参考値)

試験菌	抗菌活性値
黄色 ぶどう球菌	>5.3
大腸菌	>6.2

JIS規格に基づく走行耐久試験や シート耐荷重試験をクリア！

安全・安心を裏づける地道な試験の積み重ね

ミキは、より確かな品質をお届けするために生産した製品を試験機にかけて、あらゆる角度から検査・検証をしています。安全と安心をお約束するために、この努力を怠ることは決してありません。サニタリー車いすもこれまでの車いす同様、JIS規格に基づく100kg荷重の走行耐久試験やシート耐荷重試験(240kg)をクリアしているので、とても安全です。



走行耐久試験



シート耐荷重試験

安全
安心

サニタリー車いす
導入メリット

清潔な車いすを素早くご用意できることは、
介護に関わる方、介護を受ける方、両者にとって
とても大きなメリットになります。

- ✓ 無駄な作業時間の削減。
- ✓ 感染症の予防 など

サニタリー車いすの抗菌加工シート車。
付着した菌の繁殖を抑えられます。


施設向き 在宅向き



※ミキの車いすは折りたたためて、収納や持ち運び、
車への積み込みにも適しています。

品番 **STR-1** ● 商品コード / CJ01070
TAIS : 00122-000641 **¥95,000** (非課税価格) **自走型** **重量:13.0kg** **前座高:435mm**

● 駆動輪22インチハイポリマータイヤ、ビスなし抗菌加工背シート、ビスなし抗菌加工座シート、ワンタッチキャスタ、ワンプッシュ式ステップ、ウェーブ型ハンドルリム

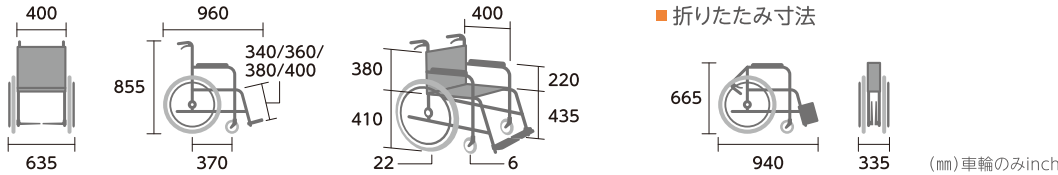

■ カテゴリー&機能マーク

抗菌加工シート ワンタッチキャスタ ワンプッシュ式ステップ 介助用ブレーキ 背折れジョイント クッションキャスタ ハイポリマータイヤ

■ シートカラー

イエローブラウン (S-17K)

耐荷重 100kg

品番・商品コードを発注時にご指示ください。

付着した菌の繁殖を抑える
抗菌加工シート

シート全面に抗菌加工を施しました。付着した菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、MRSA)の繁殖が抑えられ、著しく減少させることが可能です。



※ハイポリマータイヤ(ノーパンクタイヤ)は、クッションフロアやフローリングなど床面の材質との相性によっては車いすを走行させると汚れが付着したり、床面を傷つける場合があります。十分注意してご利用ください。


楽々シート交換 / 抗菌加工シート
スタンダード / STR-1、STR-2



※ミキの車いすは折りたたためて、収納や持ち運び、
車への積み込みにも適しています。

品番 **STR-2** ● 商品コード / CJ01071
TAIS : 00122-000642 **¥95,000** (非課税価格) **介助型** **重量:11.5kg** **前座高:460mm**

● 主輪16インチハイポリマータイヤ、ビスなし抗菌加工背シート、ビスなし抗菌加工座シート、ワンタッチキャスタ、ワンプッシュ式ステップ

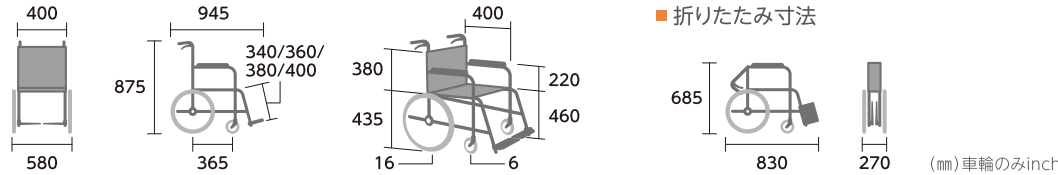

取り替え用シート

STR用ビスなし抗菌加工背シート

STR専用のスベア背シートです。
交換用の洗い替えを用意しましょう。
※注文の際、機種指定が必要です。



¥6,600 (税込)

STR用ビスなし抗菌加工座シート

STR専用のスベア座シートです。
交換用の洗い替えを用意しましょう。
※注文の際、機種指定が必要です。



¥5,500 (税込)

サニタリー車いすの抗菌加工シート車。

スムーズに移乗ができる“ウイング・スイングアウト”仕様。



※ミキの車いすは折りたためて、収納や持ち運び、車への積み込みにも適しています。

品番 **STR-3**
TAIS : 00122-000643

● 商品コード / CJ01072


¥110,000 (非課税価格)

自走型

重量: 14.5kg

前座高: 435mm

● 駆動輪22インチハイポリマータイヤ、ビスなし抗菌加工背シート、ビスなし抗菌加工座シート、ワンタッチキャスタ、ワンプッシュ式ステップ、ウェーブ型ハンドリム

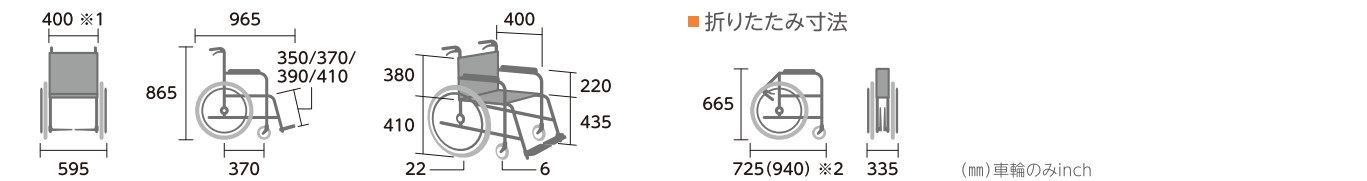

■ カテゴリー&機能マーク

■ シートカラー

※1 シート幅はアーム/パイプの内々の幅です。
※2 ()内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。

品番・商品コードを発注時にご指示ください。

※ハイポリマータイヤ(ノーパンクタイヤ)は、クッションフロアやフローリングなど床面の材質との相性によっては車いすを走行させると汚れが付着したり、床面を傷つける場合があります。十分注意してご利用ください。

耐荷重100kg

付着した菌の繁殖を抑える抗菌加工シート

シート全面に抗菌加工を施しました。付着した菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、MRSA)の繁殖が抑えられ、著しく減少させることが可能です。

楽々シート交換 / 抗菌加工シート

ウイング・スイングアウト / STR-3、STR-4



※ミキの車いすは折りたためて、収納や持ち運び、車への積み込みにも適しています。

品番 **STR-4**
TAIS : 00122-000644

● 商品コード / CJ01073


¥110,000 (非課税価格)

介助型

重量: 13.0kg

前座高: 460mm

● 主輪16インチハイポリマータイヤ、ビスなし抗菌加工背シート、ビスなし抗菌加工座シート、ワンタッチキャスタ、ワンプッシュ式ステップ

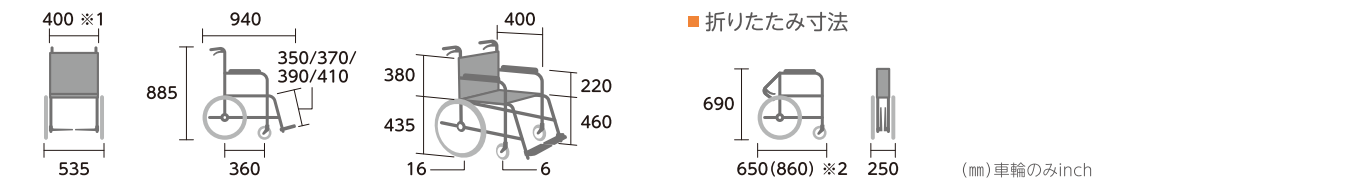

取り替え用シート

STR用ビスなし抗菌加工背シート

STR専用のスベア背シートです。交換用の洗い替えを用意しましょう。
※注文の際、機種種の指定が必要です。

¥6,600 (税込)

STR用ビスなし抗菌加工座シート

STR専用のスベア座シートです。交換用の洗い替えを用意しましょう。
※注文の際、機種種の指定が必要です。

¥5,500 (税込)

抗菌加工シート車に足踏み連動式駐車ブレーキを装備。
使用頻度の多い駐車ブレーキを直接手で触れずに済みます。

施設向き 在宅向き



楽々シート交換 / 抗菌加工シート / 足踏み連動式駐車ブレーキ

スタンダード / STR-1B、STR-2B



※ミキの車いすは折りたたみため、収納や持ち運び、車への積み込みにも適しています。



※ミキの車いすは折りたたみため、収納や持ち運び、車への積み込みにも適しています。

品番 STR-1B

TAIS : 00122-000649 **¥119,000** (非課税価格)


● 商品コード / CJ01074

自走型


重量: 13.8kg

前座高: 435mm

- 駆動輪22インチハイポリマータイヤ、ビスなし抗菌加工背シート、ビスなし抗菌加工座シート、ワンタッチキャスタ、ワンプッシュ式ステップ、ウェーブ型ハンドリム、足踏み連動式駐車ブレーキ

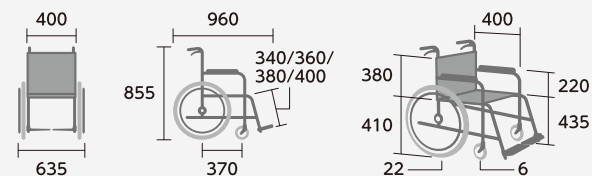

■ 折りたたみ寸法

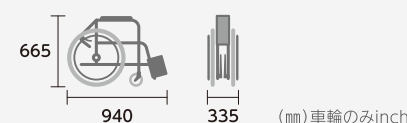

■ カテゴリー&機能マーク



■ シートカラー



イエローブラウン (S-17K)

耐荷重100kg

品番・商品コードを発注時にご指示ください。

※ハイポリマータイヤ(ノーパンクタイヤ)は、クッションフロアやフローリングなど床面の材質との相性によっては車いすを走行させると汚れが付着したり、床面を傷つける場合があります。十分注意してご利用ください。

足踏み連動式駐車ブレーキ

足踏み連動式駐車ブレーキは、足で操作するブレーキです。使用頻度の多い駐車ブレーキを直接手で触れずに済むため、とても清潔です。また、屈まないので腰に負担がかかりません。



品番 STR-2B

TAIS : 00122-000650 **¥119,000** (非課税価格)


● 商品コード / CJ01075

介助型


重量: 12.3kg

前座高: 460mm

- 主輪16インチハイポリマータイヤ、ビスなし抗菌加工背シート、ビスなし抗菌加工座シート、ワンタッチキャスタ、ワンプッシュ式ステップ、足踏み連動式駐車ブレーキ

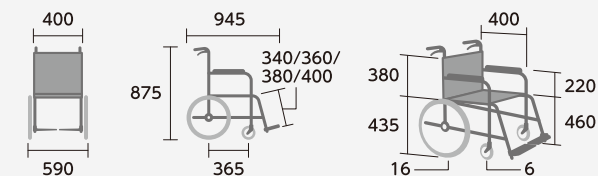

■ 折りたたみ寸法

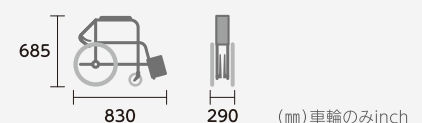

取り替え用シート

STR用ビスなし抗菌加工背シート

STR専用のスベア背シートです。交換用の洗い替えを用意しましょう。

※注文の際、機種種の指定が必要です。



¥6,600 (税込)

STR用ビスなし抗菌加工座シート

STR専用のスベア座シートです。交換用の洗い替えを用意しましょう。

※注文の際、機種種の指定が必要です。



¥5,500 (税込)

スムーズに移乗ができる“ウイング・スイングアウト”仕様に
足踏み連動式駐車ブレーキを装備しました。

施設向き 在宅向き



※ミキの車いすは折りたためて、収納や持ち運び、
車への積み込みにも適しています。

品番 STR-3B

TAIS：00122-000651

¥134,000 (非課税価格)


● 商品コード / CJ01076

自走型

重量：15.4kg

前座高：435mm

- 駆動輪22インチハイポリマータイヤ、ビスなし抗菌加工背シート、ビスなし抗菌加工座シート、ワンタッチキャスタ、ワンプッシュ式ステップ、ウェーブ型ハンドリム、足踏み連動式駐車ブレーキ

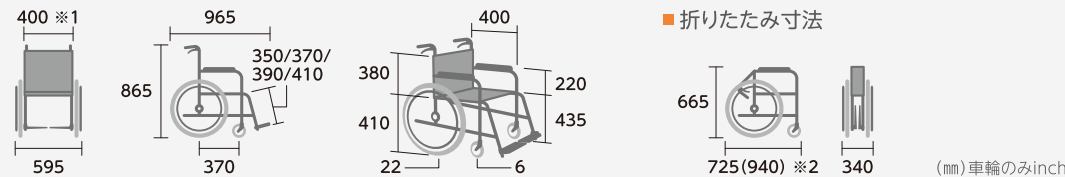

■ 折りたたみ寸法

(mm)車輪のみinch

■ カテゴリー&機能マーク



■ シートカラー



イエローブラウン
(S-17K)

※1 シート幅はアーム/パイプの内々の幅です。
※2 ()内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。

品番・商品コードを発注時にご指示ください。

※ハイポリマータイヤ(ノーパンクタイヤ)は、クッションフロアやフローリングなど床面の材質との相性によっては車いすを走行させると汚れが付着したり、床面を傷つける場合があります。十分注意してご利用ください。

耐荷重100kg

足踏み連動式駐車ブレーキ

足踏み連動式駐車ブレーキは、足で操作するブレーキです。使用頻度の多い駐車ブレーキを直接手で触れずに済むため、とても清潔です。また、屈まないで腰に負担がかかりません。

楽々シート交換 / 抗菌加工シート / 足踏み連動式駐車ブレーキ

ウイング・スイングアウト / STR-3B、STR-4B



※ミキの車いすは折りたためて、収納や持ち運び、
車への積み込みにも適しています。

品番 STR-4B

TAIS：00122-000652

¥134,000 (非課税価格)


● 商品コード / CJ01077

介助型

重量：13.6kg

前座高：460mm

- 主輪16インチハイポリマータイヤ、ビスなし抗菌加工背シート、ビスなし抗菌加工座シート、ワンタッチキャスタ、ワンプッシュ式ステップ、足踏み連動式駐車ブレーキ

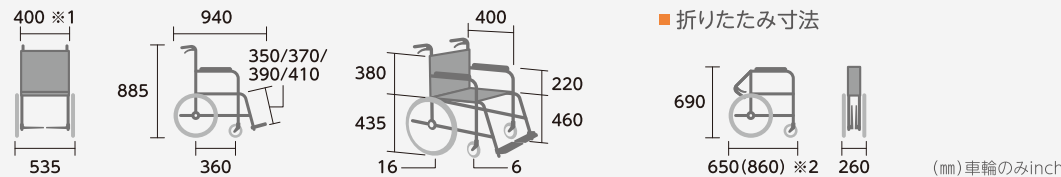

■ 折りたたみ寸法

(mm)車輪のみinch

取り替え用シート

STR用ビスなし抗菌加工背シート

STR専用のスベア背シートです。
交換用の洗い替えを用意しましょう。

※注文の際、機種種の指定が必要です。



¥6,600 (税込)

STR用ビスなし抗菌加工座シート

STR専用のスベア座シートです。
交換用の洗い替えを用意しましょう。

※注文の際、機種種の指定が必要です。



¥5,500 (税込)

JTNシリーズのスタンダードモデル。
シンプルな機能のみを装備した車いす。

施設向き 在宅向き

楽々シート交換
スタンダード / JTN-1、JTN-2



シートカラー：ヘザーブルー


※ミキの車いすは折りたためて、収納や持ち運び、車への積み込みにも適しています。

品番 **JTN-1**
TAIS：00122-000631

● 商品コード / ヘザーグレー:CJ01041、ヘザーブルー:CJ01042

● **自走型** ● **重量:12.7kg** ● **前座高:435mm**


● 駆動輪22インチハイポリマータイヤ、ビスなし背シート、ビスなし座シート、ワンタッチキャスタ、ワンプッシュ式ステップ、ウェーブ型ハンドリム

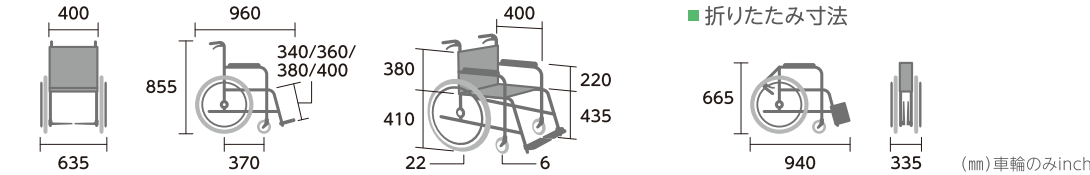

- カテゴリー&機能マーク
- ワンタッチキャスタ
 - ワンプッシュ式ステップ
 - 介助用ブレーキ
 - 背折れジョイント
 - クッションキャスタ
 - ハイポリマータイヤ

耐荷重100kg

■ シートカラー

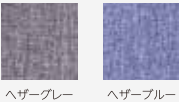

品番・シートカラー・商品コードを発注時にご指示ください。

※ハイポリマータイヤ(ノーパンクタイヤ)は、クッションフロアやフローリングなど床面の材質との相性によっては車いすを走行させると汚れが付着したり、床面を傷つける場合があります。十分注意してご利用ください。



シートカラー：ヘザーグレー


※ミキの車いすは折りたためて、収納や持ち運び、車への積み込みにも適しています。

品番 **JTN-2**
TAIS：00122-000632

● 商品コード / ヘザーグレー:CJ01043、ヘザーブルー:CJ01044

● **介助型** ● **重量:11.2kg** ● **前座高:460mm**


● 主輪16インチハイポリマータイヤ、ビスなし背シート、ビスなし座シート、ワンタッチキャスタ、ワンプッシュ式ステップ

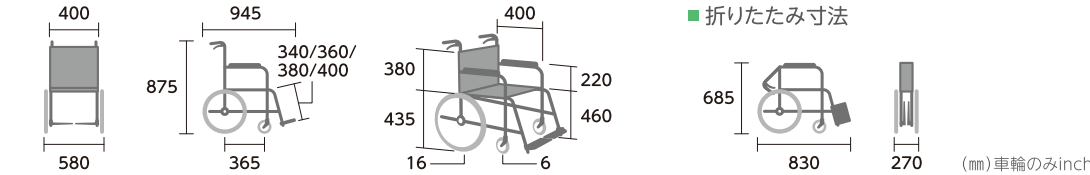

取り替え用シート

JTN用ビスなし背シート

JTN専用のスベア背シートです。交換用の洗い替えを用意しましょう。
※注文の際、機種とシートカラーの指定が必要です。

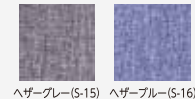

¥5,500 (税込)

写真の色はヘザーグレー

JTN用ビスなし座シート

JTN専用のスベア座シートです。交換用の洗い替えを用意しましょう。
※注文の際、機種の指定が必要です。



¥4,400 (税込)

ベッドなどの対象物により近づき、スムーズに移乗ができる
“ウイング・スイングアウト”仕様。

施設向き 在宅向き

楽々シート交換

ウイング・スイングアウト / JTN-3、JTN-4



シートカラー：ヘザーブルー


※ミキの車いすは折りたためて、収納や持ち運び、車への積み込みにも適しています。

品番 **JTN-3**
TAIS：00122-000633 **¥104,000** (非課税価格)

● 商品コード / ヘザーグレー: CJ01045、ヘザーブルー: CJ01046

自走型 重量: 14.2kg 前座高: 435mm

- 駆動輪22インチハイポリマータイヤ、ビスなし背シート、ビスなし座シート、ワンタッチキャスタ、ワンプッシュ式ステップ、ウェーブ型ハンドリム

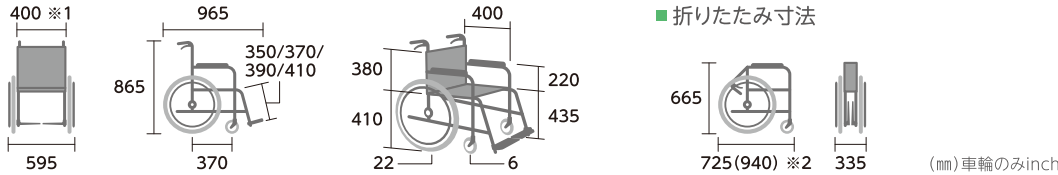

■ 折りたたみ寸法

■ カテゴリー&機能マーク



耐荷重 100kg

■ シートカラー



※1 シート幅はアームパイプの内々の幅です。
※2 ()内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。

品番・シートカラー・商品コードを発注時にご指示ください。

※ハイポリマータイヤ(ノーパンクタイヤ)は、クッションフロアやフローリングなど床面の材質との相性によっては車いすを走行させると汚れが付着したり、床面を傷つける場合があります。十分注意してご利用ください。



シートカラー：ヘザーグレー


※ミキの車いすは折りたためて、収納や持ち運び、車への積み込みにも適しています。

品番 **JTN-4**
TAIS：00122-000634 **¥104,000** (非課税価格)

● 商品コード / ヘザーグレー: CJ01047、ヘザーブルー: CJ01048

介助型 重量: 12.7kg 前座高: 460mm

- 主輪16インチハイポリマータイヤ、ビスなし背シート、ビスなし座シート、ワンタッチキャスタ、ワンプッシュ式ステップ

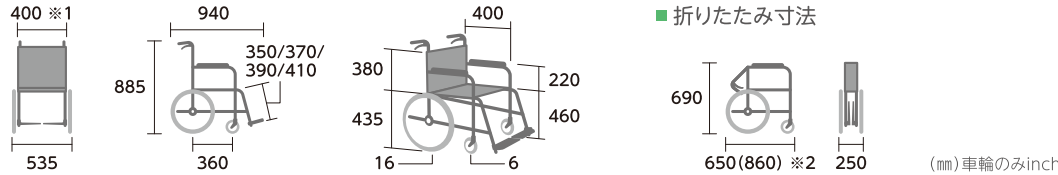


■ 折りたたみ寸法

取り替え用シート

JTN用ビスなし背シート

JTN専用のスぺア背シートです。交換用の洗い替えを用意しましょう。

※注文の際、機種とシートカラーの指定が必要です。

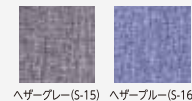

¥5,500 (税込)

写真の色はヘザーグレー

JTN用ビスなし座シート

JTN専用のスぺア座シートです。交換用の洗い替えを用意しましょう。

※注文の際、機種と座の指定が必要です。



¥4,400 (税込)

JTNのスタンダードモデルに足踏み連動式駐車ブレーキを装備。
使用頻度の多い駐車ブレーキを直接手で触れずに済みます。

施設向き 在宅向き

楽々シート交換 / 足踏み連動式駐車ブレーキ

スタンダード / JTN-1B、JTN-2B



シートカラー：ヘザーブルー

※ミキの車いすは折りたためて、収納や持ち運び、車への積み込みにも適しています。



シートカラー：ヘザーグレー

※ミキの車いすは折りたためて、収納や持ち運び、車への積み込みにも適しています。

品番

JTN-1B

TAIS：00122-000645

¥113,000 (非課税価格)


● 商品コード / ヘザーグレー: CJ01078、ヘザーブルー: CJ01079

自走型

重量: 13.6kg

前座高: 435mm

- 駆動輪22インチハイポリマータイヤ、ビスなし背シート、ビスなし座シート、ワンタッチキャスタ、ワンプッシュ式ステップ、ウェーブ型ハンドリム、足踏み連動式駐車ブレーキ

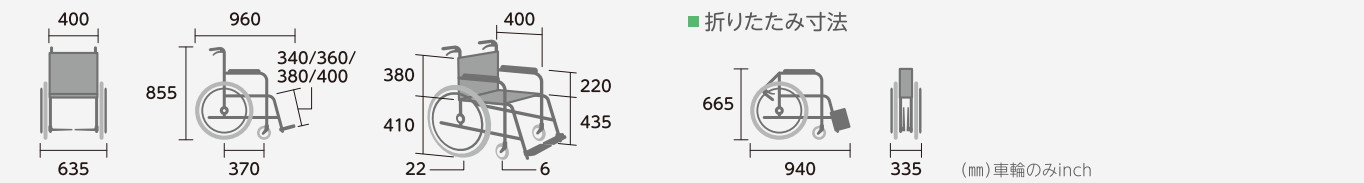

■ カテゴリー&機能マーク

ワンタッチキャスタ

ワンプッシュ式ステップ

足踏み連動式駐車ブレーキ

介助用ブレーキ

背折れジョイント

クッションキャスタ

ハイポリマータイヤ

■ シートカラー

ヘザーグレー (S-15)

ヘザーブルー (S-16)

品番・シートカラー・商品コードを
発注時にご指示ください。

※ハイポリマータイヤ(ノーパンクタイヤ)は、クッションフロアやフローリングなど床面の材質との相性によっては車いすを走行させると汚れが付着したり、床面を傷つける場合があります。十分注意してご利用ください。

耐荷重 100kg

足踏み連動式駐車ブレーキ

足踏み連動式駐車ブレーキは、足で操作するブレーキです。使用頻度の多い駐車ブレーキを直接手で触れずに済むため、とても清潔です。また、屈まないで腰に負担がかかりません。



品番

JTN-2B

TAIS：00122-000646

¥113,000 (非課税価格)


● 商品コード / ヘザーグレー: CJ01080、ヘザーブルー: CJ01081

介助型

重量: 12.0kg

前座高: 460mm


- 主輪16インチハイポリマータイヤ、ビスなし背シート、ビスなし座シート、ワンタッチキャスタ、ワンプッシュ式ステップ、足踏み連動式駐車ブレーキ

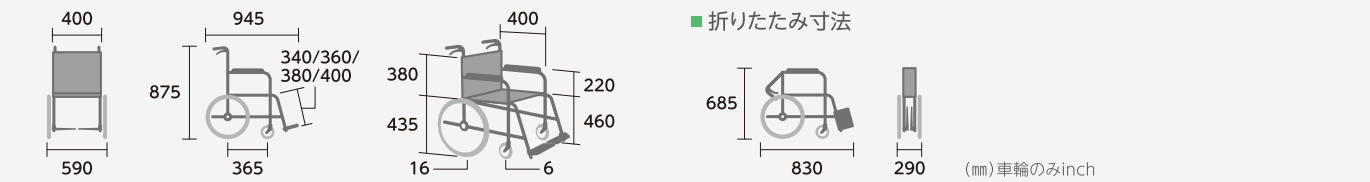

取り替え用シート

JTN用ビスなし背シート

JTN専用のスペア背シートです。交換用の洗い替えを用意しましょう。
※注文の際、機種とシートカラーの指定が必要です。

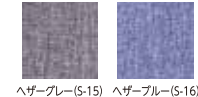

¥5,500 (税込)

写真の色は
ヘザーグレー

JTN用ビスなし座シート

JTN専用のスペア座シートです。交換用の洗い替えを用意しましょう。
※注文の際、機種の指定が必要です。

¥4,400 (税込)

スムーズに移乗ができる“ウイング・スイングアウト”仕様に
足踏み連動式駐車ブレーキを装備しました。

施設向き 在宅向き




シートカラー：ヘザーブルー

※ミキの車いすは折りたためて、収納や持ち運び、
車への積み込みにも適しています。

品番 **JTN-3B**
TAIS：00122-000647 **¥128,000** (非課税価格)
● 商品コード / ヘザーグレー:CJ01082、ヘザーブルー:CJ10183
自走型 **重量:15.1kg** **前座高:435mm**

- 駆動輪22インチハイポリマータイヤ、ビスなし背シート、ビスなし座シート、ワンタッチキャスタ、ワンプッシュ式ステップ、ウェーブ型ハンドリム、足踏み連動式駐車ブレーキ

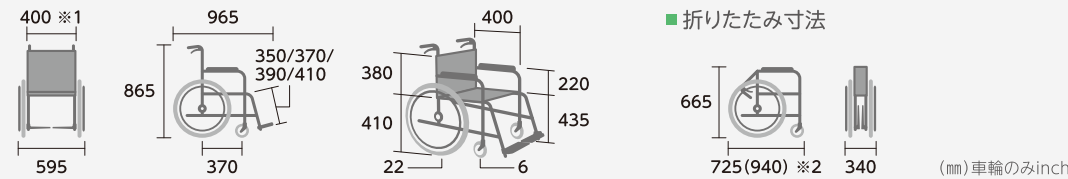


■ 折りたたみ寸法

■ カテゴリー&機能マーク



■ シートカラー

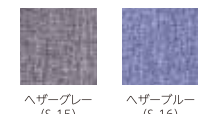

※1 シート幅はアームパイプの内々の幅です。
※2 ()内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。

品番・シートカラー・商品コードを発注時にご指示ください。

※ハイポリマータイヤ(ノーパンクタイヤ)は、クッションフロアやフローリングなど床面の材質との相性によっては車いすを走行させると汚れが付着したり、床面を傷つける場合があります。十分注意してご利用ください。

耐荷重100kg

足踏み連動式駐車ブレーキ

足踏み連動式駐車ブレーキは、足で操作するブレーキです。使用頻度の多い駐車ブレーキを直接手で触れずに済むため、とても清潔です。また、屈まないで腰に負担がかかりません。

楽々シート交換 / 足踏み連動式駐車ブレーキ

ウイング・スイングアウト / JTN-3B、JTN-4B




シートカラー：ヘザーグレー

※ミキの車いすは折りたためて、収納や持ち運び、
車への積み込みにも適しています。

品番 **JTN-4B**
TAIS：00122-000648 **¥128,000** (非課税価格)
● 商品コード / ヘザーグレー:CJ01084、ヘザーブルー:CJ01085
介助型 **重量:13.4kg** **前座高:460mm**

- 主輪16インチハイポリマータイヤ、ビスなし背シート、ビスなし座シート、ワンタッチキャスタ、ワンプッシュ式ステップ、足踏み連動式駐車ブレーキ

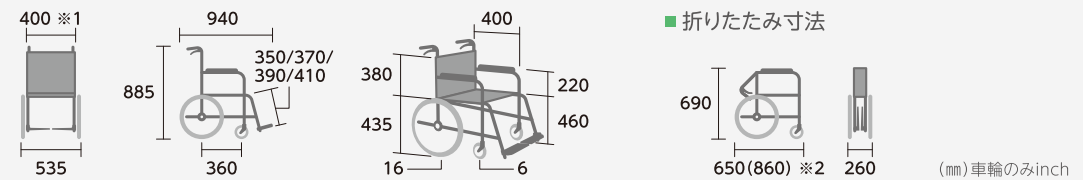


■ 折りたたみ寸法

取り替え用シート

JTN用ビスなし背シート

JTN専用のスぺア背シートです。交換用の洗い替えを用意しましょう。

※注文の際、機種とシートカラーの指定が必要です。

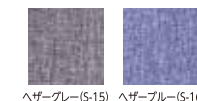

¥5,500 (税込)

写真の色はヘザーグレー

JTN用ビスなし座シート

JTN専用のスぺア座シートです。交換用の洗い替えを用意しましょう。

※注文の際、機種の指定が必要です。



¥4,400 (税込)